



Luôn đồng hành cùng bạn

MÁY MÁT XA MJ- 303

Chăm sóc chân tốt cũng là một cách tốt để chăm sóc sức khoẻ. Đôi chân hay còn được gọi là trái tim thứ hai của cơ thể là phần tập trung của toàn cơ thể, là nơi chứa khoảng 60 vùng kích ứng và 7000 huyết. Ta có thể cải thiện các phần cơ thể yếu và ngăn ngừa bệnh tật bằng cách kích thích những vùng và các huyết này và nhờ thế tác động đến nhịp điệu vận hành của toàn cơ thể.

Công ty Unix- Maxstar sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm đã chế tạo thành công máy mát xa chân MJ-303 với chất lượng cao được người tiêu dùng Hàn Quốc cũng như Châu Âu tin nhiệm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MJ-303
Nguồn điện	AC 220 V 50 - 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	60W
Tốc độ quay	55-70 vòng/phút
Trọng lượng	5000 g
Kích cỡ	483 x 293 x 170mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm giắc điện vào ổ nguồn. Nhấn nút On/Off.
- Dùng công tắc ở giữa để lựa chọn tốc độ mát xa thích hợp (bật lên để chọn chế độ mát xa mạnh; bật xuống để chọn chế độ mát xa vừa phải). Khi mới sử dụng, tốt nhất nên bật máy ở mức thấp để cơ thể thích nghi dần sau đó mới chọn chế độ mạnh hơn.
- Bạn có thể mát xa bụng, đùi, bàn chân, để kích thích các huyết và dây thần kinh ở các khu vực này, làm giảm mệt mỏi, đau chân, nhức mỏi cơ bắp..... Sức nóng từ đèn hồng ngoại giúp thúc đẩy nhanh các quá trình trao đổi chất và thải các độc tố ra khỏi cơ thể.
- Bạn có thể tháo lớp vỏ bọc bên ngoài để mát xa gan bàn chân dễ dàng và hiệu quả hơn.
- Nên giới hạn sử dụng máy trong vòng 10-15 phút mỗi lần.

LƯU Ý

- Tránh mát-sa lâu tại một bộ phận cơ thể. Bởi điều đó sẽ khiến các dây thần kinh và cơ bắp phải làm việc quá sức. Và làm cho việc mát-sa trở nên kém hiệu quả.
- Không được sử dụng máy cho mục đích nào khác ngoài mục đích mát-sa.
- Những người nằm trong các trường hợp sau không nên dùng máy: Trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh cấp tính, phẫu thuật, gãy xương, hậu phẫu, loãng xương, chảy máu trong.
- Ngừng sử dụng máy nếu có cảm giác buồn nôn hay khó chịu.
- Không dùng máy trong vòng 30 phút sau khi ăn.
- Nên tắm và uống nước trước khi mát sa để đạt được kết quả tốt nhất.
- Không phủ hoặc trùm khăn lên máy vì sẽ cản trở sự thoát nhiệt của máy.
- Tắt máy và rút phích cắm ra ổ điện sau khi sử dụng.

CẢNH BÁO

- Để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật hay gây chấn thương cho người sử dụng, không được để quên máy khi đã cắm điện. Ngắt điện ngay khi dùng xong.
- Không dùng máy khi đang tắm hoặc ở nơi ẩm ướt
- Không nên đặt máy ở những nơi dễ đổ, dễ ngấm nước
- Để máy xa tầm với trẻ em.
- Sử dụng máy theo đúng hướng dẫn sử dụng.
- Không được sử dụng máy khi dây điện hoặc ổ cắm bị hỏng hoặc máy đã bị rơi, hỏng, trực trực.

BẢO QUẢN

- Trước khi lau chùi máy, rút bỏ ổ cắm điện, và lau máy bằng vải ẩm.
- Không dùng nước hay bất cứ dung dịch gì để rửa máy hoặc để nước, dung dịch ngấm vào máy.
- Sau khi lau sạch, phải chờ máy khô hoàn toàn mới tiếp tục sử dụng.
- Sau khi dùng xong cất máy ở nơi khô, thoáng mát.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH

Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số 76 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (84) 9426204- (84) 8212631

FAX: (844) 5762880 Email: ttecmedical@hn.vnn.vn

Website: www.tte.com.vn