



BỒN MASSAGE CHÂN TẠO SÓNG WBB

Là thiết bị điều trị các nhược điểm ở gan chân sử dụng bồn massage tạo sóng giữ nóng nước . Không chỉ làm đẹp cho bàn chân, mà còn mang lại sức khoẻ cho con người. Chỉ cần một vài phút trong một ngày cũng đủ để thư giãn tình trạng căng thẳng của bạn .

Bồn Massage WBB medisana đã đưa ra một yêu cầu tốt nhất cho việc này. Nó tạo nên sức mạnh để massage gan bàn chân trong trường hợp có nước hoặc không có nước một cường độ mát xa rộng.

** Với sự áp dụng đa dạng công nghệ mới, nên bất cứ chương trình nào bạn chọn cũng vẫn giúp bạn đạt được hiệu quả cho cơ thể và tâm hồn mà mọi người sử dụng cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất.*

Hãy đọc kỹ trước khi sử dụng!

Bạn đã mua được một sản phẩm chất lượng cao, bồn massage chân tạo sóng WBB. Nó giúp bạn khoẻ mạnh hơn nếu bạn sử dụng một cách đúng đắn.

Cách chữa bằng xoa bóp dầu thơm:

- Hoặc với cách chữa dân gian (lá ngải cứu đun lấy nước bỏ vài hạt muối rồi ngâm tác dụng của ngải cứu đặc tính nóng nên dễ làm khí huyết lưu thông, với củ gừng bạn có thể giã nhỏ cho nước sôi và muối rồi ngâm hoặc với gừng cũng có tác dụng chữa mọi giảm đau. Với những người mất ngủ có thể dùng hoa cúc rất tốt điều trị chứng mất ngủ an thần và giúp làm đẹp da.
- **1..2 Gợi ý sử dụng**

Nói chung bạn chỉ cần mất 10 - 15 phút cho việc massage chân mỗi ngày từ 1 đến 2 lần

Tuy nhiên bạn phải đảm bảo rằng thiết bị phải mát hoàn toàn trước khi sử dụng lại

(VD: 1 người đã dùng 15 phút — 20 phút, thì bạn nên để máy nghỉ cho motor mát rồi tiếp tục đến người khác dùng để máy được bền hơn)

2. Những thông tin khi bắt đầu sử dụng:

2.1 Massage với nước thật là hiệu quả :

- Trước khi đổ nước vào thiết bị, bạn phải chắc chắn rằng chưa cắm nguồn điện . Chỉ cắm phích cắm vào nguồn điện một lần khi bồn tạo sóng đã được đổ nước và được đặt trên mặt bằng ổn định.

2.2 Massage chân không có nước :

- Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị để Massage chân không có nước. Để bật chương trình này bạn bật ở vị trí hiển thị ở số (1) và số (2) — WBB chức năng massage và giữ nhiệt độ của nước luôn giúp bạn được thoải mái .

3. Khi sử dụng:

3.1 Cho nước vào thiết bị :

- Bồn tạo sóng WBB có thể đổ nước lên đến 3, 3 lít nước. Có điểm đánh dấu mực nước tối đa khi cho nước vào bồn tạo sóng. Bạn có thể sử dụng nước lạnh hoặc nước ấm với chất phụ gia hoặc không có.
- 3.2 Đặt chức năng:**
- Ngồi một cách tự nhiên thoải mái trước bồn Massage tạo sóng lựa chọn một trong 3 chức năng khác nhau ở vị trí nút bật . Tất cả ba vị trí đều sử dụng chức năng nóng.
VD: Giữ nước luôn ổn định nhiệt độ trong vòng 20 phút. Tuy nhiên thiết bị không thiết kế để làm nóng nước. VD: Nếu bạn đổ nước lạnh thì nước vẫn duy trì nước lạnh.

4. Bảo dưỡng và lau chùi :

- Trước khi lau chùi thiết bị, bạn phải chắc chắn rằng thiết bị đã tắt và đã rút ra khỏi nguồn điện . Đổ nước ra ngoài rồi sau đó dùng vải ẩm để lau chùi thiết bị khi nó đã nguội hẳn. Không sử dụng bất cứ hoá chất gì để lau chùi thiết bị.
- VD: chất hoá học, chất lỏng tẩy rửa. Bởi vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị. Cát giữ thiết bị ở nơi khô ráo.

5 . Những hướng dẫn an toàn:

- Không để ngập thiết bị trong nước hoặc trong chất lỏng
- Nếu nước hoặc chất lỏng thâm nhập vào máy thì bạn phải tháo phích cắm ra ngay lập tức
- Không sử dụng thiết bị nếu dây điện hoặc ổ cắm bị hỏng. Bạn tránh để dây dẫn lên trên bề mặt nóng
- Tắt thiết bị khi không sử dụng và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện .
- Không đứng vào bên trong của thiết bị, thiết bị không thiết kế để đỡ cho cả cơ thể.
- Đặt thiết bị vào chỗ bằng phẳng mà thiết bị không thể lật đổ
- Chỉ nên chạm vào nút bật và ổ cắm khi tay hoàn toàn khô ráo.
- Không sử dụng dây cáp để rút phích cắm hay mang thiết bị.
- Lưu ý không sử dụng thiết bị xung quanh nơi có trẻ em hoặc người tàn tật
- Thiết bị không sử dụng cho mục đích thương mại
- Điện áp của thiết bị phải được dùng đúng như điện áp tương đương của mỗi quốc gia.
- Không dịch chuyển thiết bị khi thiết bị đã bật
- Chỉ sử dụng thiết bị đúng với mục đích trong hướng dẫn
- Không sử dụng thiết bị ngoài trời hoặc trong phòng ẩm ướt
- Không bao giờ được bịt lỗ thông gió ở phía dưới đáy của thiết bị
- Nếu thiết bị có sự trục trặc , không tự ý sửa chữa, không sử dụng thiết bị khác . Hãy hỏi ý kiến của các chuyên gia của hãng, việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia của hãng .
- Nếu bạn có vấn đề về đôi chân của bạn, bệnh về mạch máu... hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng.

6. Thông số kỹ thuật :

- Tên và Model : Bồn tạo sóng ngâm chân WBB
- Trọng lượng : 3 kg
- Nguồn điện cung cấp : 230 V / 50 Hz
- Công suất tiêu thụ : 106 W

7 .Bảo hành :

Những điều kiện để áp dụng khi thực hiện bảo hành :

1/ Bảo hành 3 năm kể từ ngày mua sản phẩm của Medisana . Trong trường hợp người bảo hành , ngày mua phải được chứng minh chính xác trong thẻ bảo hành hoặc trong hoá đơn .2/ Những nhược điểm của vật liệu hay những lỗi của nhà sản xuất sẽ được bảo hành miễn phí trong giai đoạn bảo hành.

3/ Việc bảo hành không có nghĩa là bảo hành cho thiết bị hay các bộ phận đã được kéo dài thời gian hơn.

4/ Những điều sau không bao gồm trong thẻ bảo hành :

a) Tất cả các hư hại do việc sử dụng không đúng , vd : Không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng .

b) Hư hại do việc sửa chữa , hoặc do sự nắn bóp của khách hàng hay một tổ chức thứ 3

c) Hư hại trong quá trình vận chuyển thiết bị đến trung tâm dịch vụ khách hàng

5/ Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp nguyên nhân của việc hỏng hóc thiết bị cũng không bao gồm trong những trường hợp mà không bao gồm ở thẻ bảo hành.



MEDISANA®
HOME HEALTH CARE