



Luôn đồng hành cùng bạn

MÁY MÁT XA TẮC ĐỘNG KÉP UN-2000M

Sản phẩm máy mát xa tác động kép UN-2000M do công ty Unix- Maxstar (Hàn Quốc) nghiên cứu và sản xuất đã đạt được nhiều chứng chỉ về chất lượng như ISO 9001 và CE,... là sự lựa chọn tốt nhất để giúp bạn giảm bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Máy có 2 đầu mát xa lớn, lần lượt mát xa mạnh các vùng cơ bắp nhức mỏi, làm tan biến mệt mỏi, đem lại cảm giác thư giãn thoải mái, cơ thể sảng khoái.



MÁY MÁT XA ĐẪM TẮC ĐỘNG KÉP UN-2000M

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY MÁT XA ĐẪM TẮC ĐỘNG KÉP UN-2000M	
Mức tiêu thụ điện năng	30W
Mức cung cấp năng lượng	A/C 220V, 50Hz
Độ rung	2300-3000/phút
Độ ồn	Dưới 60+ (dB)
Chiều dài dây điện	2m
Kích cỡ	146x120x400 (RxCxD)
Trọng lượng	1250g

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm giắc điện vào ổ nguồn.
- Dùng công tắc để điều chỉnh độ mát xa mạnh nhẹ.
- Đẩy thanh công tắc xuống vị trí **Low** để giảm mức độ mát xa và đẩy công tắc lên theo hướng vị trí **High** nếu cần mát xa mạnh hơn.
- Nhấn nút đèn(**Lamp**) khi cần dùng đèn hồng ngoại và nhiệt khi mát xa. Nhấn một lần nữa khi cần tắt đèn.
- Sau khi sử dụng, đẩy thanh công tắc đến vị trí tắt (**Off**) và sau đó rút giắc cắm ra khỏi ổ điện.

3. CHÚ Ý

- Không mát xa trực tiếp vào một vùng cơ thể quá lâu. Tốt nhất nên liên tục di chuyển máy mát xa tới các vùng khác nhau trên cơ thể.
- Nên hạn chế thời gian sử dụng máy trong khoảng từ 10-15 phút mỗi lần. Sử dụng lâu quá có thể làm nóng động cơ và giảm độ bền của máy.
- Luôn mát xa theo hướng vận hành của máu. Mát xa chân tay theo hướng từ dưới lên để kích thích máu dồn về tim.
- Cơ thể và da của mỗi người phản ứng với nhiệt và mát xa khác nhau vì thế phải điều chỉnh thời gian mát

xa, độ mạnh và nhiệt sao cho thích hợp với từng người và từng bộ phận cơ thể.

- Không dùng máy cho những người thuộc các nhóm sau: phụ nữ đang mang thai, người ốm, người bị u lành hoặc u ác tính, người bị xuất huyết, viêm da, viêm tĩnh mạch, nghẽn mạch, vết thương hở miệng, sưng tấy, da trầy xước hoặc người bị bệnh giãn tĩnh mạch, đau bắp cơ không rõ nguyên do.
- Khi mát xa luôn cảm thấy dễ chịu và thư giãn. Nếu thấy khó chịu, đau hoặc buồn nôn, phải ngừng mát xa ngay.
- Tham vấn bác sĩ nếu bạn có thắc mắc khi sử dụng máy mát xa này.

4. CẢNH BÁO

- Để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật hay gây chấn thương cho người sử dụng, không được để quên máy khi đã cắm điện. Ngắt điện ngay khi dùng xong.
- Không dùng máy khi đang tắm hoặc ở nơi ẩm ướt
- Không nên đặt máy ở những nơi dễ đổ, dễ ngấm nước
- Cần phải đặc biệt để ý khi sử dụng gần trẻ em, hoặc người tàn tật, người thiếu năng.
- Sử dụng máy theo đúng hướng dẫn sử dụng.
- Không được sử dụng máy khi dây điện hoặc ổ cắm bị hỏng hoặc máy đã bị rơi, hỏng, trục trặc.
- Không để dây dẫn gần nơi có nhiệt độ cao

5. BẢO QUẢN

- Trước khi lau chùi máy, rút bỏ ổ cắm điện, và lau máy bằng vải ẩm.
- Không dùng nước hay bất cứ dung dịch gì để rửa máy hoặc để nước, dung dịch ngấm vào máy.
- Sau khi lau sạch, phải chờ máy khô hoàn toàn mới tiếp tục sử dụng.
- Sau khi dùng xong cất máy ở nơi khô, thoáng mát.

6. BẢO HÀNH

Máy mát xa đấm tác động kép UN-2000M được bảo hành miễn phí trong vòng một năm tính từ ngày bán với các hư hỏng do lỗi của nguyên vật liệu hoặc quá trình sản xuất.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành các hư hỏng do thiên tai như cháy, hoả hoạn, hoặc do dùng sai hướng dẫn, dùng máy sai mục đích, tự động tháo lắp máy....

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành
Số 9 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
FAX: (844) 5762880. Email: tecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn

