

MÁY MÁT XA ĐẪM MG 60

Máy mát xa MG 60 là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình hàng đầu của Beurer. Với tính năng độc đáo, kiểu dáng hiện đại, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất, MG 60 đã thực sự làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất của thị trường Châu Âu và thế giới. Sản phẩm đã đạt được các chứng chỉ Châu Âu và quốc tế về chất lượng như CE, ISO...

Với 2 đầu mát xa công suất lớn, mát xa mạnh các vùng cơ bắp, đem lại kết quả tốt nhất, giúp bạn hoàn toàn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của máy, cần đọc kỹ và làm đúng theo những chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT



Các bộ phận của máy mát xa MG 60 bao gồm:

- Tay cầm không trượt
- Nút công tắc tròn dùng để lựa chọn các chế độ:
 - + OFF: chế độ tắt máy
 - + ON : chế độ mát xa
- Thanh trượt để điều chỉnh tốc độ mát xa
- 2 đầu mát xa lớn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu (model)	MG 60
Điện nguồn	220V~ 230V - 50 Hz 40W
Thời gian sử dụng tốt nhất	Tối đa 15 phút

CÁCH SỬ DỤNG

- Máy phải ở chế độ tắt trước khi cắm điện. Sử dụng nút công tắc tròn để lựa chọn chế độ tắt hoặc bật máy (ON/OFF).
- Điều chỉnh thanh trượt để chọn mức mát xa thích hợp.
- Bạn có thể đứng, ngồi hoặc nằm khi mát xa. Có thể tự mát xa cho mình hoặc cho người khác. Mức độ

mát xa mạnh hay nhẹ tùy theo độ tì của máy lên cơ thể.

- Nên liên tục thay đổi vùng mát xa, không mát xa cố định trên một bộ phận cơ thể quá 3 phút.
- Không nên sử dụng máy quá 15 phút. Sau khi dùng xong, tắt máy, rút điện, và để máy nguội bớt. Cất giữ máy ở nơi khô ráo

CHÚ Ý - VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

- Chỉ dùng nguồn điện đúng theo thông số đã ghi trên máy.
- Khi sử dụng máy mát xa này cần tuân theo những quy định chặt chẽ nhằm tránh rủi ro về điện như:
 - Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện ngay sau khi dùng xong.
 - Tránh để máy tiếp xúc với nước, không được để nước ngấm vào máy, không sử dụng máy ở những nơi ẩm ướt như trong phòng tắm, bể bơi,... Nếu nước ngấm vào máy, rút điện ra ngay lập tức, sau đó thông báo cho trung tâm bảo hành.
 - Trước mỗi lần sử dụng, cần kiểm tra lại dây dẫn. Nếu dây bị hỏng hoặc đứt, không được cắm giắc vào ổ điện.
 - Không dùng dây điện để treo hoặc xách máy.
 - Nếu trong quá trình sử dụng, máy bị trục trặc, cần tắt máy ngay và thông báo cho trung tâm bảo hành.
 - Không tự động sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận trong máy.
- Chỉ sử dụng máy để mát xa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ vấn đề gì nảy sinh do sử dụng không đúng mục đích hoặc do bất cẩn.
- Để tránh nóng máy, không sử dụng máy liên tục quá 15 phút. Sau 15 phút, nên ngắt điện, chờ máy nguội bớt trước khi sử dụng tiếp.
- Trẻ em hoặc người tàn tật khi sử dụng máy phải có sự hướng dẫn của người lớn đã biết cách sử dụng.
- Những người bị bệnh tim mạch cần tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng và không nên mát xa vùng tim.
- Không nên mát xa khi bạn bị sốt cao vì cảm lạnh, đang mang thai, bị bệnh giãn tĩnh mạch, nghẽn mạch, bệnh vàng da, tiểu đường, đau dây thần kinh tọa ... Trong những trường hợp đó, bạn cần phải tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng.

VỆ SINH MÁY

Sau khi tắt máy, để máy nguội bớt, sau đó lau máy bằng một miếng vải ẩm. Không dùng nước để rửa máy. Và chỉ tiếp tục dùng lại khi máy đã khô hoàn toàn.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành
Số 9 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
FAX: (844) 5762880. Email: tecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn