

MÁY MÁT XA MG20

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của máy, cần đọc kỹ và làm đúng theo những chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.



CÁCH SỬ DỤNG

Dùng thanh công tắc để lựa chọn chế độ mát xa thích hợp. Có 4 chế độ :

- M+W: Mát xa có đèn hồng ngoại
- W: dùng đèn hồng ngoại
- M: mát xa
- 0: Tắt máy

Nếu muốn sử dụng chế độ mát xa có đèn hồng ngoại, tốt nhất nên chọn chế độ đèn trước vì phải chờ một lúc đèn mới nóng lên được. Khi bề mặt mát xa ấm lên, bạn có thể bắt đầu chế độ mát xa có kèm đèn hồng ngoại.

Khi mát xa nên đưa máy nhẹ nhàng theo hướng tuần hoàn máu từ dưới lên trên, và vòng quanh các bắp chân, tay; không nên ấn mạnh máy khi đang mát xa.

Lưu ý:

Nhiệt độ có thể lên rất cao nếu bạn bật đèn quá lâu nhưng không sử dụng. Vì thế để đảm bảo an toàn bạn nên dùng tay kiểm tra độ nóng của đèn trước khi bắt đầu mát xa. Bạn có thể giảm bớt sức nóng bằng cách tạm thời tắt đèn, sau đó bật lại.

MÁT XA DÙNG CÁC ĐẦU ĐI KÈM

Để tăng cường độ mát xa, nên dùng các đầu mát xa đi kèm. Mỗi kiểu đầu mát xa có chức năng khác nhau:

- Đầu gai: Mát xa khắp cơ thể (khoảng 10-15 phút)
- Đầu hình nón: Mát xa các vùng cơ bắp (khoảng 3-5 phút)
- Đầu hình phễu: Mát xa các vùng da nhạy cảm như vùng ngực (khoảng 3-5 phút).
- Không dùng đầu đi kèm: Sử dụng đèn hồng ngoại, và mát xa các vùng da nhạy cảm.

VỆ SINH MÁY

Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ nguồn trước khi vệ sinh máy. Lau máy bằng giẻ khô. Không dùng nước để rửa máy. Bạn có thể rửa các đầu mát xa đi kèm bằng nước xà phòng ấm. Chỉ tiếp tục sử dụng khi máy đã khô hoàn toàn.

CHÚ Ý – VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

- Chỉ cắm máy vào nguồn điện đúng theo thông số đã ghi trên máy.
- Khi sử dụng máy mát xa này cũng cần tuân theo những quy định chặt chẽ nhằm tránh rủi ro về điện như:
 - Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện ngay sau khi sử dụng xong
 - Tránh để máy tiếp xúc với nước, không được để nước ngấm vào máy, không sử dụng máy ở những nơi ẩm ướt như trong phòng tắm, bể bơi,...Nếu nước ngấm vào máy, rút điện ra ngay lập tức, sau đó thông báo cho trung tâm bảo hành.
 - Trước mỗi lần sử dụng, cần kiểm tra lại dây dẫn. Nếu dây bị hỏng hoặc đứt, không được cắm giắc vào ổ điện.
 - Không dùng dây điện để treo hoặc xách máy.
 - Nếu trong quá trình sử dụng, máy bị trục trặc, cần tắt máy ngay và thông báo cho trung tâm bảo hành.
 - Không tự động sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận trong máy.
- Chỉ sử dụng máy để mát xa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ vấn đề gì nảy sinh do sử dụng không đúng mục đích hoặc do bất cẩn.
- Không dùng máy với các đầu mát xa khác ngoài 2 bộ đầu đi kèm
- Để tránh nóng máy, không nên sử dụng máy liên tục quá 15 phút. Sau 15 phút, nên ngắt điện, chờ máy nguội bớt trước khi sử dụng tiếp.
- Trẻ em hoặc người tàn tật khi sử dụng máy phải có sự hướng dẫn của người lớn đã biết cách sử dụng.
- Những người bị bệnh tim mạch cần tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng và không bao giờ được mát xa vùng tim.
- Không nên mát xa khi bạn bị sốt cao vì cảm lạnh, đang mang thai, bị bệnh giãn tĩnh mạch, nghẽn mạch, ... Trong những trường hợp đó, bạn cần phải tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH
Số 9 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631

FAX: (844) 5762880. Email: ttecmedical@hn.vnn.vn

Website: www.tte.com.vn