



Luôn đồng hành cùng bạn

MÁY MÁT XA CẦM TAY UN-820

Máy mát xa cầm tay UN-820 là sản phẩm hàng đầu của công ty Maxstar-Unix. Sản phẩm được người tiêu dùng Hàn Quốc cũng như những khách hàng khó tính nhất Châu Âu tin tưởng và sử dụng. Với chất lượng đảm bảo và tính năng độc đáo, UN-820 luôn đem lại những kết quả tốt nhất. Sản phẩm đã liên tục đạt được các chứng chỉ về chất lượng như ISO 9001, CE...



Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, phát huy tối đa tác dụng của máy, cần lưu ý đọc kỹ và làm theo đúng những chỉ dẫn dưới đây. Giữ bản hướng dẫn này lại phòng khi cần

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY MÁT XA CẦM TAY	
Model	UN-820
Nguồn điện sử dụng máy	Dc 2.4V, 1300mAh
Thời gian sạc pin	10 giờ /sử dụng lần đầu
Thời gian sử dụng pin	Trong vòng 60 phút
Trọng lượng	1.2kg
Kích thước	106X116X367

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Có thể dùng điện hoặc pin sạc, tiện lợi khi sử dụng.
- Hai mức độ mát xa mạnh yếu để bạn chọn lựa.
- Có thể điều chỉnh máy theo nhiều góc khác nhau, giúp mát xa tất cả các bộ phận trên cơ thể rất dễ dàng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sử dụng công tắc trượt trên tay cầm để tắt bật và điều chỉnh độ mạnh nhẹ của máy.
- Để thay đổi vị trí của đầu mát xa, một tay giữ chặt tay cầm của máy, một tay từ từ vận đầu mát xa đến khi đạt đúng góc mình muốn. Không được cố sức vận khi đầu mát xa đạt đến điểm giới hạn dùng.
- Bốn mặt mát xa đem lại các cảm giác khác nhau với từng bộ phận cơ thể:
 1. Mặt mát xa hình đầu ngón tay: Những mấu nhỏ hình đầu ngón tay trên mặt mát xa khi rung sẽ giúp tăng khả năng mát xa của máy.
 2. Mặt thư giãn cơ bắp: Bề mặt có các đường vân nổi chạy dài làm tan biến mệt mỏi, làm giảm bớt đau cơ bắp.
 3. Mặt lồi: phù hợp với các đường nét cơ thể.

4. Mặt nhẵn: mát xa mạnh, đều đặn giúp tiêu biến cảm giác căng thẳng đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu

CHÚ Ý

- Nên giới hạn sử dụng máy trong vòng từ 10-15 phút mỗi lần. Không mát xa trực tiếp vào một vùng cơ thể quá lâu.
- Liên tục di chuyển máy mát xa tới các vùng khác nhau trên cơ thể.
- Luôn mát xa theo hướng vận hành của máu.
- Mát xa chân tay theo hướng từ dưới lên để kích thích máu dồn về tim.
- Cơ thể và da của mỗi người phản ứng với nhiệt và mát xa khác nhau vì thế phải điều chỉnh thời gian mát xa, độ mạnh và nhiệt sao cho thích hợp với từng người và từng bộ phận cơ thể.
- Không dùng cho những người thuộc các nhóm dưới đây: người có tim đập nhanh, phụ nữ đang mang thai, người ốm, người bị u lạnh hoặc u ác tính, người bị xuất huyết, viêm da, viêm tĩnh mạch, nghẽn mạch, vết thương đang mở miệng, sưng tấy, da trầy xước hoặc người bị bệnh giãn tĩnh mạch, và đau bắp cơ không rõ nguyên do.
- Không dùng cho những vùng nhạy cảm nhiệt.
- Tham vấn bác sĩ trong trường hợp bạn có thắc mắc khi sử dụng máy mát xa này.

BẢO QUẢN

- Khi lau chùi máy nên rút bỏ ổ cắm điện, và lau máy bằng vải ẩm.
- Không rửa máy bằng nước hay bất cứ dung dịch gì.
- Sau khi dùng xong cất máy ở nơi khô thoáng mát.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành
 Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
 FAX: (844) 5762880. Email: ttecmedical@hn.vnn.vn
 Website: www.tte.com.vn