

MÁY MASSAGE CHÂN – LƯNG

MODEL: FRM



Chúc mừng quý khách hàng đã lựa chọn mua sản phẩm massage chân gai FRM của Hãng Medisana CHLB Đức, Sản phẩm chính Hãng được bảo hành tiêu chuẩn 03 năm. Massage các huyết ở gang bàn chân có thể loại trừ được tế bào một cách hữu hiệu thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình tạo bạch huyết, cân bằng cải thiện từ trường, điều chỉnh các dây thần kinh để đầy mạnh khả năng kháng bệnh của các cơ quan trong cơ thể. Bên cạnh đó thông qua việc massage các dây thần kinh ở gang bàn chân có thể cải thiện được hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, đường tiết niệu và điều trị phụ khoa và các bệnh liên quan đến sinh lý.



Chức năng của FRM:

1. Giảm đau cơ, đau dây thần kinh và tăng cường khả năng trao đổi chất.
2. Kích thích vòng tuần hoàn máu và làm thư giãn các cơ xương, đặc biệt là rất tốt cho người luôn phải làm việc với tư thế không đổi trong thời gian dài.
3. Massage ở gang bàn chân có lợi cho tỳ vị, bảo vệ gan thận cải thiện sức khỏe. Bổ sung các tiểu hoàn tăng cường chức năng trong cơ thể và các tế bào cơ khiến cho sức khỏe của chúng ta kéo dài
4. Ngoài chức năng chủ đạo là massage gang bàn chân thì FRM còn có chức năng massage lưng làm thư giãn giảm đau, đẩy nhanh quá trình lưu thông máu của cơ thể nhờ vào đá Thạch Anh.
5. Sử dụng máy này lâu dài có thể ngăn ngừa sự tập trung những phần máu huyết không lưu thông và làm cơ thể khỏe mạnh hơn.

Vùng phản xạ vào lòng bàn chân?

Vùng phản xạ vào lòng bàn chân liên quan đến các điểm dây thần kinh tại bàn chân. Các điểm dây thần kinh ấy có quan hệ trực tiếp với nhau quan hệ với các vùng khác của cơ thể và có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên cơ thể. Phần lớn những vùng phản xạ này nằm tại bàn chân, thiên nhiên muốn rằng con người cần đi chân trần trên mặt đất khô ráo với những đá sỏi và cành lá và những vùng phản xạ chính được nghiên cứu theo hướng này.



Bởi vì việc mát xa lòng bàn chân cũng giống như việc mát xa kích thích cơ thể một cách gián tiếp và để cơ thể hoạt động một cách bình thường. Máu sẽ tuần hoàn tốt hơn trên các dây thần kinh, các mạch máu và các vùng phản xạ của bàn chân cũng như các cơ quan khác tạo nên quá trình trao đổi chất bình thường và loại bỏ axit uric. Để tránh những ảnh hưởng đến các khớp xương thông qua việc loại bỏ những chất độc hại này ra khỏi cơ thể. Bàn chân của con người phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể, và sự phản ánh từng vùng không chỉ chống lại một phần nào đó của bệnh tật mà nó còn có tác dụng chữa trị triệt để tận gốc các bệnh.

Lợi ích của máy FRM với vùng thắt lưng.

Đối với những người mắc chứng bệnh như mỏi phần lưng và vùng thắt lưng thì sẽ cảm thấy dễ chịu ngay sau khi sử dụng thiết bị này. Đặc biệt là khi bạn phải làm việc vất vả hoặc ngồi và đứng không đúng tư thế, đó là nguyên nhân của căn bệnh vẹo cột sống và sự rối loạn dây thần kinh. Nếu bạn liên tục sử dụng thiết bị này thì cột sống của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục.

Điều quan trọng.

Hãng Medisana thiết kế loại máy FRM massage lưu thông vòng tuần hoàn máu nhờ vào những đầu gai và đá theo khoa học hiện đại kết hợp với thuyết y học cổ truyền của người Trung Quốc. Nó có thể mang đến cho bạn thật nhiều hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ cao. Thiết bị này có tần suất cao, từ tính lớn, có khả năng chữa trị bằng sức nóng và trị bệnh có kết quả nhanh. Sản phẩm công nghệ cao này được điều khiển bằng hệ vi mạch. Thiết bị này có những chức năng sau: Chức năng chữa trị bằng nhiệt có thể điều chỉnh ở mức độ nóng lạnh khác nhau; chức năng rung có thể điều chỉnh ở mức độ theo người sử dụng. Thiết bị này rất dễ sử dụng và đem lại kết quả cao.

Độ xoáy và độ rung của máy có tần suất cao, do đó nó kích thích mô tế bào khiến cho cơ thể thoải mái và ngủ ngon giấc hơn. Nó có thể tăng cường được sự miễn dịch của cơ thể và khả năng kháng lại bệnh tật. Thông qua tất cả các huyết của cơ thể, thiết bị này có thể kích hoạt vòng tuần hoàn máu và khai thông được các mạch máu có nguy cơ tắc nghẽn. Nó tăng cường sự trao đổi chất và giảm bớt triệu chứng của bệnh tật trong máu: như là bệnh ung thư và bệnh tim. Hơn nữa, nó có thể tăng tính đàn hồi của da và dây chằng.

Chúng ta có thể đẩy lùi các bệnh bằng cách massage lòng bàn chân, nó có tác dụng lưu thông vòng tuần hoàn máu vì massage có thể xóa sạch những vùng da chết trên gang bàn chân làm cân bằng và phát triển dải điện từ trong cơ thể, huy động và tăng cường khả năng chống lại bệnh tật trong cơ thể.

Máy massage FRM với ứng dụng rộng rãi

Bàn chân và lưng của chúng ta bị căng thẳng trong từng ngày và hàng ngày, và có thể làm cho chúng ta căng thẳng bị tổn thương đau cơ hoặc cứng cơ. Máy massage FRM để giúp bạn massage bàn chân của bạn, điều trị phần lưng nhằm giúp cho bạn cảm giác thấy thoải mái trong một ngày dài. Với FRM bạn có thể chọn lựa để đạt được kết quả tốt như:

1. Massage gang bàn chân
2. Massage phần lưng ở phía trên hoặc phía dưới
3. Làm phản xạ massage
4. Nhiệt độ điều chỉnh vòng tròn

Bạn phải lựa chọn phương thức massage chân hay lưng theo ý bạn để chọn chế độ massage mạnh nhẹ và nóng lạnh khác nhau

Chú ý

* Không nên sử dụng trong khoảng thời gian sau bữa ăn 30 phút. Không nên hút thuốc lá hoặc ăn trong khi sử dụng.

* **Những người mắc bệnh truyền nhiễm, nhạy cảm, thì không nên sử dụng máy**

* Phụ nữ đang trong thời gian mang bầu thì không nên sử dụng.

Cách sử dụng máy.

Đặt máy lên trên sàn phẳng, cắm nguồn điện. Ngồi trên ghế thoải mái sau đó đặt gang bàn chân lên máy. Bạn cũng có thể điều chỉnh góc của máy cho phù hợp với bạn bằng cách bật hai nút điều chỉnh chân ở phía dưới bên cạnh máy

- Ấn nút massage (3) một lần tạo rung trên bề mặt (5) và đầu rung ở cấp độ 1. Đèn LED bên cạnh “LO” sáng lên, chỉ ra rằng cấp độ rung đang hoạt động ấn thêm nút bật massage lần nữa thì độ rung (2) xuất hiện và đèn chỉ thị thay đổi từ “LO” lên “HI”
- Ấn nút massage một lần nữa thì sẽ tắt rung
- Bạn sẽ có thể đốt nóng bề mặt bằng cách ấn nút có chức năng đốt nóng> Chức năng đốt nóng có thể hoạt động được cùng lúc với độ rung của máy. Đèn LED bên cạnh nút (4) chỉ rằng đốt nóng hoạt động. Bạn có thể tắt sự đốt nóng bằng việc ấn nút (4) thêm một lần nữa.
- Lưu ý: Khi tắt hẳn cả hai chức năng (rung và đốt nóng) hoàn toàn trước khi rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.

1. Massage tác động đến các vùng của bàn chân:

Đá Thạch Anh có tác dụng day sâu vào các huyết điều trị bệnh là ý tưởng vì mục đích cho những vùng đặc biệt có trạng thái căng thẳng trên cơ thể trở lên tiền bộ hơn và làm con người cảm thấy khỏe mạnh. Tập chung vào những vùng massage như gang bàn chân bạn sẽ thấy phù hợp với cơ thể muốn điều trị bệnh. Mỗi lần cần massage từ 10 – 15 phút.



2. Massage lưng thư giãn :

Massage phần lưng trên: Bật chân chống khóa thông minh có thể điều khiển được cho đến khi bạn cảm thấy bạn có thể dùng được, bây giờ bạn treo máy vào thành ghế. Bạn phải có một cái ghế tựa như ghế văn phòng. Cắm máy vào nguồn điện, phải chắc rằng đầu phích cắm không căng quá. Nút điều chỉnh (3) và (4) cũng được hoạt động như khi massage chân. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này cho việc điều trị cứng cơ và làm dễ chịu tình trạng căng thẳng ở cổ và ở phần lưng. Một lần nữa bạn hoàn thành việc massage và bạn có thể điều trị cùng lúc với hơi nóng. Mỗi lần điều trị từ 10-15 phút



Sau khi sử dụng xong, để giữ an toàn các bạn nên tắt hết chức năng hoạt động của máy.

Chu trình nhiệt độ cho điều trị:

Đặt máy massage trên sàn trước một cái ghế tựa và cắm phích vào nguồn điện

Trước khi bật chương trình nóng, lạnh, bạn sử dụng nút Hot/Cold để lựa chọn nhiệt độ theo nhu cầu

Gạt nút Hot/Cold sang phải để lựa chọn điều trị hơi nóng, hoặc gạt nút sang bên trái để chọn chế độ lạnh. Bề mặt điều trị nóng sẽ tăng lên, sẽ bắt đầu nóng hay lạnh bằng việc bạn gạt 2 nút một lần trên máy, ấn thêm (2) một lần nữa sẽ tăng thêm nhiệt độ cấp 2. Cứng lúc đó đèn chỉ thị sẽ thay đổi từ “LO” tới “HI” ấn nút (2) một lần nữa sẽ tắt điều trị nóng. Đèn bên cạnh nút (2) sẽ tắt

Thay thế điều trị nóng và lạnh từ ba đến năm vòng kích thích lòng bàn chân và làm thúc đẩy sự lưu thông máu

Nếu bạn muốn dùng điều trị có thể bao gồm chức năng massage



Phân đóng gói sản phẩm (Máy bao gồm):

- * 01 máy massage
- * 01 quyển sách hướng dẫn 6 thứ tiếng
- * 01 bản hướng dẫn Tiếng Việt
- * 01 phiếu bảo hành 3 năm

Thông số kỹ thuật	
Tên và Model :	MEDISANA - FRM
Cân nặng :	2kg
Điện áp sử dụng:	230 V/ 50Hz
Công suất tiêu thụ:	50 W

Cuối cùng chúng tôi chúc các bạn thành công và cảm thấy thoải mái với sản phẩm máy massage FRM của Hãng Medisana. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ có kinh nghiệm lâu dài và hài lòng với sản phẩm.

Chú ý: Trước khi sử dụng

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng trước khi dùng.
- Đặt máy ở vị trí cố định rồi mới cắm phích vào ổ điện.
- Để xa tầm với của trẻ em và những người bị tâm thần
- **Không được đứng trên mặt máy**
- Không nên sử dụng khi máy đã bị hỏng. Tốt nhất khi máy hỏng bạn nên liên hệ với các đại lý chính thức của hãng.
- Máy chỉ sử dụng cho mục đích đặc biệt đã mô tả như trong sách hướng dẫn sử dụng. Bất kỳ sự sử dụng sai sẽ không được bảo hành.
- Không được ngồi hay đứng lên máy.
- Tránh vật sắc nhọn vào máy.
- Nếu có bất kỳ lỗi nào không được tự ý sửa chữa.
- Khi bảo hành máy phải có phiếu bảo hành khi mua máy

Bảo quản máy

* Lau chùi và chăm sóc máy. Lau sạch máy sau mỗi lần sử dụng với vải ẩm và mềm. Không sử dụng hóa chất hoặc bàn chải cứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không để thiết bị chìm trong nước hoặc dây điện trong nước. Nếu bị nước lọt vào trong thiết bị thì nhớ là phải rút phích điện ngay lập tức và liên hệ ngay với địa lý của Hãng. Không cần thiết bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị nếu thiết bị sử dụng đúng theo sách hướng dẫn

SẢN PHẨM BẢO HÀNH 03 NĂM TOÀN CẦU

Điều kiện bảo hành và sửa chữa: Trong trường hợp có lỗi khi sử dụng máy thì nên thông tin với nhà cung cấp. Những điều kiện bảo hành được áp dụng trong những trường hợp này: **Medisana** đưa ra bảo hành thay đổi các sản phẩm của Hãng 03 năm kể từ ngày mua thiết bị. Bằng chứng ngày mua sẽ được ghi tại Phiếu Bảo Hành. Khi kỹ thuật viên của Hãng kiểm tra sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ có cách sửa chữa không mất phí trong vòng 03 năm bảo hành.

Phần lỗi sản phẩm không nằm trong điều kiện được bảo hành: Tất cả hỏng hóc do không sử dụng đúng mục đích của máy, như không xem kỹ hướng dẫn sử dụng, dẫn đến sử dụng sai. Sản phẩm bị người sử dụng tự ý sửa chữa.

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Cao TM
 Nhập khẩu & Phân Phối độc quyền sản phẩm Hãng Medisana
 Địa chỉ: 103 E8 Phố Phương Mai, Đống Đa, TP Hà Nội
 Tel: (043) 5763435 Fax: (043) 5763436
 www.medisana.com.vn