



MÁY XÔNG MŨI HỌNG EOLO

Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, nhà sản xuất máy xông chuyên nghiệp Cami S.n.C – ITALY đã đưa ra thị trường model máy xông mới - EOLO với những tính năng chuyên biệt, tiện ích nhất cho việc chữa trị các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm họng, viêm xoang, viêm đường miệng. Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, cần đọc kỹ các hướng dẫn trước khi dùng máy.

MÔ TẢ MÁY



1. Ống xông họng
2. Bầu xông
3. Miếng lọc khí
4. Ống dẫn khí
5. Lỗ thoát khí

LINH KIỆN:

Ống xông mũi, ống xông họng, bầu xông, ống dẫn khí, mặt nạ : Mặt nạ người lớn và mặt nạ trẻ em

CÁCH SỬ DỤNG

1. Cắm giắc cắm vào ổ điện. Tránh để dây điện bị xoắn
2. Cắm nắp bầu xông xoay nhẹ ngược chiều kim đồng hồ để mở ra.
3. Chọn loại van thích hợp đặt vào đáy bầu. Có 3 loại van cho từng mục đích sử dụng khác nhau:
 - Van A: Kích thước hạt thuốc vào khoảng 5-10 micron.
 - Van B: Kích thước hạt thuốc từ 3 đến 5 micron.
 - Van C: Kích thước hạt thuốc trong khoảng 0,5-3 micron, có thể thấm sâu đến tận phế nang.
4. Cho thuốc vào bầu xông, sau đó đậy nắp lại và xoay theo chiều kim đồng hồ.
5. Cắm một đầu ống dẫn khí vào lỗ thoát khí của máy, đầu kia nối với bầu xông.

6. Tùy theo mục đích sử dụng mà chọn mặt nạ, ống xông họng hoặc ống xông mũi (theo chỉ định của bác sĩ).
7. Kiểm tra để chắc chắn miếng lọc khí đã được lắp vào máy.
8. Bật công tắc (O/I) lên vị trí I và bắt đầu xông.
9. Tắt máy, ngắt điện sau khi sử dụng xong.
10. Sau mỗi lần dùng, luôn bảo quản dây điện và các linh kiện trong khoang chứa của máy.

Lưu ý:

- Trong quá trình xông, nếu hơi lên ít hoặc thoát ra ngoài nhiều, cần kiểm tra lại bầu xông (nắp bầu không được vặn quá chặt), chỉnh lại van trong bầu, hoặc làm vệ sinh nếu bầu xông quá bẩn. Nên giới hạn thời gian sử dụng máy 30 phút mỗi lần để đảm bảo độ bền của máy.
- Khi sử dụng, luôn giữ bầu xông ở phương thẳng đứng, hướng lên với phần màu xanh ở phía trên để tránh thuốc hoặc dung dịch tràn ra ngoài.
- Chỉ sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY

- Khi mua máy hoặc trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra toàn bộ máy để tránh trường hợp vỏ máy bị nứt, dây điện bị đứt, xước trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.
- Thay bầu xông mới trong trường hợp bầu cũ lâu không sử dụng, hoặc bị nứt, vỡ, hay bị tắc do nhiều cặn thuốc khô hoặc bụi.
- Luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là:
- Khi sử dụng, luôn đặt máy ở những nơi có bề mặt phẳng, thoáng, tránh để đồ vật che mất lỗ thông khí ở hai bên máy.
- Tránh bảo quản và sử dụng máy ở những chỗ quá nóng. Không nên động vào ổ cắm khi tay ướt, không dùng máy khi đang tắm. Không ngâm máy vào nước, dung dịch. Trong trường hợp nước ngấm vào máy, phải ngắt điện ngay lập tức, và nhờ trung tâm bảo hành kiểm tra lại máy trước khi dùng tiếp.
- Hoạt động của máy có thể bị ảnh hưởng của các tác dụng điện từ khi để gần TV hoặc radio đang mở, vì vậy nên để máy cách xa TV, radio hoặc dùng hẳn một ổ cắm riêng.
- Chỉ sử dụng máy với nguồn điện theo đúng những thông số trên máy. Nên tắt máy, rút giắc cắm ra khỏi ổ điện ngay sau khi dùng xong.
- Không sử dụng máy với thuốc gây mê hoặc những dung dịch chứa thuốc gây mê để bắt lửa khi tiếp xúc với không khí hoặc ôxy.
- Trước khi sử dụng máy cần đọc kỹ và hiểu các thông tin cần biết. Tránh xa tầm với của trẻ em. Trẻ em và người tàn tật khi dùng máy cần phải có sự giúp đỡ của người lớn đã biết cách sử dụng.
- Không tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa máy. Nếu máy không hoạt động, hoặc trục trặc, tắt máy và liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

VỆ SINH MÁY

- Lau máy bằng giẻ ẩm.
- Mỗi lần sử dụng xong, nên dùng xà phòng và nước ấm để rửa bầu và các linh kiện kèm theo, sau đó lau thật sạch. Không nên sử dụng các loại tinh dầu vì có thể làm rạn nứt hoặc hỏng bầu xông. Không tiết trùng các linh kiện bằng cách đun sôi hoặc cho vào lò vi sóng.
- Để đề phòng lây bệnh, không nên dùng chung linh kiện với những bệnh nhân khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	EOLO
Nguồn điện	230V/ 50Hz
Điện năng tiêu thụ	184VA
Cầu chì	F1x1.6A 250V
Áp suất tối đa	2.5 bar
Lưu lượng khí tối đa	12 l/phút
Áp suất hoạt động	0.9 Bar
Lưu lượng khí ở áp suất hoạt động	6l /phút
Kích thước hạt thuốc	từ 1 đến 10 micron
Độ ồn tối đa	59.2 dB (A)
Thời gian hoạt động	Hoạt động 30 phút/ nghỉ 30 phút
Kích cỡ	148x124x223 mm
Trọng lượng	1.65 kg
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ : 10°C- 40°C Độ ẩm : 20 -85% RH
Điều kiện bảo quản và vận chuyển	Nhiệt độ: -25°C đến 70°C Độ ẩm:10% - 95%

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG MÁY

MÔ TẢ LỖI	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Lưu lượng khí ít	Tắc bầu xông	Lau rửa sạch bầu xông, nếu tốc độ khí vẫn không thay đổi, thay bầu mới
Không phun hơi	Tắc bầu xông	Kiểm tra, đảm bảo trong bầu có thuốc, đầu bầu không bị kết thuốc không, hoặc kiểm tra lại các điểm nối giữa ống dẫn khí với máy và bầu .
Xông chậm	Thuốc quá đặc	Thêm nước hoặc dung dịch pha thuốc để làm loãng thuốc
Máy quá ồn	Sử dụng quá thời gian cho phép	Thông báo cho cửa hàng hoặc trung tâm bảo hành

Trong trường hợp thực hiện đúng theo hướng dẫn trên nhưng vẫn không xử lý được lỗi, nên liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bảo hành, nhà sản xuất để được tư vấn và sửa chữa.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành

Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
FAX: (844) 5762880 Email: ttecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn