



HOSPYNEB PROFESSIONAL

HOSPYNEB là một trong những máy xông đang được ưa chuộng trên thị trường Châu Âu hiện nay. Được sản xuất tại nước Cộng hoà Italy bởi Công ty 3A Healthcare, một công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong việc sản xuất máy xông. Máy được thiết kế chuyên dùng trong chữa trị các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm họng, viêm xoang, viêm đường miệng... Máy có thể sử dụng liên tục nên rất thích hợp dùng trong bệnh viện hoặc các phòng khám. Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, cần đọc kỹ các hướng dẫn trước khi dùng máy.

LINH KIỆN

Ống xông mũi
Ống xông họng
Bầu xông Andy Flow
Ống dẫn khí
Mặt nạ cho người lớn
Mặt nạ cho trẻ em
Miếng lọc khí thay thế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện: 230V~50Hz 70VA
Áp suất vận hành: từ 0 đến 1,8 bar.
Áp suất tối đa: 3,5bar.
Lưu lượng khí: 22 l/phút
Độ ồn: 65 dB
Kích cỡ: 18x25,5x12cm
Trọng lượng: 3,5 kg
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 10°C- 40°C
Độ ẩm: 10% - 95%
Môi trường bảo quản: Nhiệt độ: -25°C -70°C
Độ ẩm: 10% - 95%

CÁCH SỬ DỤNG

1. Cắm giắc cắm vào nguồn điện theo đúng thông số đã ghi trên máy.

2. Cắm nắp bầu xông xoay nhẹ ngược chiều kim đồng hồ để mở ra. Chọn loại van thích hợp đặt vào đáy bầu. Có 3 loại van cho từng mục đích sử dụng khác nhau:
 - Van A: Kích thước hạt thuốc vào khoảng 4-10 micron.
 - Van B: Kích thước hạt thuốc từ 3 đến 5 micron.
 - Van C: Kích thước hạt thuốc trong khoảng 1-3 micron, thấm sâu vào tận phế nang.
3. Cho thuốc vào bầu xông theo đơn của bác sĩ. Chú ý, những vạch trên bầu chỉ là những thông số ước lượng.
4. Đậy nắp bầu xông lại, xoay theo chiều kim đồng hồ.
5. Cắm ống dẫn khí vào lỗ khí Outlet
6. Tùy theo mục đích sử dụng mà chọn mặt nạ, ống xông họng hoặc ống xông mũi.
7. Đặc biệt để lượng thuốc ra nhiều hay ít bạn có thể điều chỉnh nút tròn bên cạnh bầu xông.
8. Tắt máy, ngắt điện sau khi sử dụng xong.

CHÚ Ý - VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

- Để dây điện tránh xa những chỗ quá nóng.
- Không nên động vào ổ cắm khi tay ướt, không dùng máy khi đang tắm. Không ngâm máy vào nước. Trong trường hợp nước ngấm vào máy, phải ngắt điện ngay lập tức, và nhờ trung tâm bảo hành kiểm tra lại máy trước khi dùng tiếp.
- Hoạt động của máy có thể bị ảnh hưởng của các tác dụng điện từ khi để gần TV hoặc radio đang mở, vì vậy nên để máy cách xa TV, radio hoặc dùng hẳn một ổ cắm riêng.
- Không dùng máy trong phòng tắm hoặc ở những nơi quá ẩm ướt.
- Luôn tắt máy, ngắt điện ngay sau khi sử dụng xong.
- Không tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa máy. Nếu máy không hoạt động, tắt máy và thực hiện đúng theo các bước trong phần hướng dẫn sử dụng. Nếu máy trục trặc, liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.
- Không sử dụng máy với thuốc gây mê hoặc những dung dịch chứa thuốc gây mê dễ bắt lửa khi tiếp xúc với không khí hoặc oxy.
- Trước khi sử dụng máy cần đọc kỹ và hiểu các thông tin cần biết. Trẻ em và người tàn tật khi dùng máy cần phải có sự giúp đỡ của người lớn đã biết cách sử dụng.
- Phải sử dụng thuốc theo đúng đơn của bác sĩ.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

MÁY KHÔNG HOẠT ĐỘNG

- Kiểm tra xem giắc cắm đã cắm hẳn vào máy chưa.
- Kiểm tra xem công tắc đã ở vị trí On chưa.

MÁY ĐÃ BẬT NHUNG KHÔNG PHUN HƠI

- Kiểm tra xem van đã khít với bầu xông chưa.
- Kiểm tra xem ống khí có bị bẹp hoặc cong không.
- Kiểm tra xem miếng lọc khí có bị tắc hoặc quá bẩn không, nếu cần có thể thay miếng lọc mới.
- Kiểm tra xem thuốc đã được cho vào bầu chưa.

MÁY NGỪNG HOẠT ĐỘNG

- Nhờ cầu chì bảo vệ, máy sẽ tự động tắt khi hoạt động gần nguồn nhiệt hoặc trong môi trường quá nóng (khoảng 40⁰C). Trong trường hợp này, đợi khoảng ít nhất 60 phút sau để máy nguội bớt, sau đó mới sử dụng tiếp.

VỆ SINH MÁY

- Thay miếng lọc khí: Khi miếng lọc khí đã đen lại hoặc quá bẩn, cần thay miếng mới. Nhấc nắp bảo vệ miếng lọc, bỏ miếng lọc cũ ra và thay miếng lọc mới vào. Sau đó đậy nắp bảo vệ như cũ.
- Không ngâm máy vào nước hoặc rửa máy dưới vòi nước. Nên dùng một mảnh vải ẩm để lau máy.
- Rửa ống mũi và ống họng bằng nước sạch. Có thể đun sôi khoảng 5-10 phút để diệt trùng.
- Rửa bầu: Sau khi sử dụng, mở nắp bầu, rửa sạch bằng xà phòng và nước ấm và lau thật sạch.
- Để đề phòng lây bệnh, không nên dùng chung linh kiện với những bệnh nhân khác.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH
Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
FAX: (844) 5762880. Email: ttecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn