

MÁY XÔNG SIÊU ÂM IH30

Máy xông siêu âm IH30 của Beurer là một trong những máy xông đang được ưa chuộng nhất trên thị trường Châu Âu hiện nay. Máy đã đạt được chứng chỉ về chất lượng Châu Âu CE 0344.

Với chất lượng cao, lưu lượng khí dung lớn, độ ồn rất nhỏ và độ an toàn tuyệt đối, bạn có thể hoàn toàn yên tâm và thoải mái khi sử dụng máy xông siêu âm IH30. Đặc biệt, máy còn có pin phụ trợ kèm theo, rất tiện lợi khi đi xa

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của máy, cần đọc kỹ và thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT



- 1 Mặt nạ
- 2 Bình thuốc
- 3 Túi đựng
- 4 Nút tắt bật (On/Off)
- 5 Ống dẫn khí

DIỆN NGUỒN

Máy có thể hoạt động bằng 2 loại nguồn điện khác nhau:

1. Dùng điện: Dây điện thích hợp khi sử dụng trong nhà với hiệu điện thế của nguồn là 220V~230V. Cắm phần giắc nhỏ của adapter vào ổ cắm dưới đáy máy xông, cắm đầu kia vào ổ điện, máy đã sẵn sàng hoạt động.
2. Dùng pin: Bạn có thể dùng pin khi cần sử dụng máy ở những nơi không có hoặc không tiện cắm điện (như khi đi chơi). Cắm giắc pin vào ổ cắm ở khoang dưới đáy máy xông, bạn có thể sử dụng máy trong vòng 30 phút. Nếu xuất

hiện đèn báo màu đỏ hoặc nhấp nháy có nghĩa là pin đã hết và cần phải sạc lại pin. Chỉ sử dụng pin do nhà sản xuất cung cấp, sử dụng các loại pin khác có thể làm hỏng máy.

CÁCH SỬ DỤNG

Lau thật kỹ với máy sử dụng lần đầu hoặc được dùng lại sau một thời gian dài.

Đổ nước vào bầu

1. Cắm dây điện hoặc cắm giắc pin vào máy xông
2. Máy phải đang ở chế độ tắt (Đèn báo không sáng hoặc nhấp nháy)
3. Mở nắp trên cùng của máy xông
4. Chỉ rót nước (khoảng 20-30°C) vào bầu bằng vòi nếu không bạn có thể làm hỏng máy. Tốt nhất, bạn nên đun nước ấm trước khi sử dụng. Nếu nhiệt độ nước thấp hơn 20°C thì tốc độ xông sẽ giảm đi rất nhiều so với khi nước ở khoảng nhiệt cho phép. Nước càng nóng, tốc độ xông hơi càng lớn. Mức nước đổ vào phải nằm ở khoảng giữa hai vạch bên trong bầu.
5. Đổ sạch nước khỏi bầu sau mỗi lần sử dụng

Cho thuốc vào cốc

1. Đặt cốc đựng thuốc lên bầu nước.
2. Đổ thuốc thẳng vào cốc, không được đổ quá đầy, tối đa là 5ml
3. Chỉ sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
4. Nếu lượng thuốc ít hơn 2ml, đổ thêm nước hoặc dung dịch muối để đạt đến mức 4ml. Cũng cần phải pha loãng nếu thuốc quá đặc. Trong những trường hợp này, nên hỏi ý kiến bác sĩ.
5. Đậy lại nắp trên của máy.
6. Thay cốc thuốc nếu thấy dấu hiệu hỏng: nứt hoặc có vết rạn trắng.

Sử dụng máy xông với linh kiện kèm theo (tự chọn)

Có thể dùng máy có hoặc không kèm theo mặt nạ. Tốt nhất nên dùng mặt nạ khi xông cho trẻ em

QUÁ TRÌNH XÔNG

- Để máy hoạt động đúng và đem lại kết quả tối đa, phải giữ máy ở tư thế thẳng đứng trước khi bật công tắc. Trong quá trình xông, không lắc hoặc nghiêng máy để tránh thuốc tràn xuống bầu nước.
- Nhấn nút ON/OFF để bật máy. Đèn báo màu xanh xuất hiện
- Điều chỉnh phần lọc ở sau máy để có được lưu lượng khí theo nhu cầu. Khi nhìn thấy 3 lỗ khí trên miếng lọc có nghĩa là lưu lượng khí đã đạt tới mức độ tối đa.
- Sử dụng mặt nạ xông nếu cần. Trong quá trình sử dụng mặt nạ, bạn nên hít vào và thở ra bằng mồm nhờ thế khí thuốc có thể đi vào tận trong phổi. Nếu để điều trị các bệnh về mũi, hãy hít vào bằng mũi và thở ra bằng mồm.

- Nếu lượng hơi lên không liên tục có nghĩa là cốc thuốc đã hết, có thể chờ khi hơi lên hết hoàn toàn hoặc máy sẽ tự động tắt sau 10 phút sử dụng.
- Nhấn nút ON/ OFF để tắt máy. Đèn báo sẽ tắt. Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện và dây điện ra khỏi máy.
- Để sạch thuốc và nước cặn trong bầu và làm vệ sinh máy như mô tả phía dưới. Chờ 30 phút để máy nguội bớt nếu muốn sử dụng tiếp.

Mở nắp trên, cốc thuốc, phần lọc khí, và lau những phần này cùng mặt nạ và dây dẫn bằng vải ẩm và dung dịch khử trùng trung tính.
Lau vỏ máy bằng vải mềm, ẩm và nước. Rửa bầu nước bằng nước sạch.
Chỉ dùng vải mềm, khô để lau cánh quạt trong máy.
Để máy, dây điện và pin tránh xa ánh sáng trực tiếp của mặt trời, nhiệt độ cao hoặc nơi ẩm ướt.

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

Mô tả lỗi	Nguyên nhân/ xử lý
Nhấn nút ON/OFF nhưng máy vẫn không hoạt động	- Kiểm tra xem dây điện hoặc pin đã lắp vào máy đúng chưa - Kiểm tra xem bầu nước đã được đổ đầy đủ chưa - Kiểm tra xem pin còn không
Hơi lên ít hoặc không có hơi	-Kiểm tra xem cốc thuốc đã đổ đầy chưa (ít nhất là 2ml và nhiều nhất là 5 ml) và cốc không bị vỡ - Phần máy dưới cốc phải sạch
Quạt không hoạt động	- Kiểm tra xem quạt đã được lắp đúng và chắc chắn với motor chưa

Xạc pin

Cắm phần giắc nhỏ của dây điện vào ổ phía dưới pin. Cắm đầu kia vào ổ điện. Đèn báo pin sáng
Lần đầu sử dụng hoặc sau một thời gian dài không dùng máy, cần phải nạp pin trong khoảng 24 giờ, những lần sau chỉ cần nạp 4-12 giờ tùy theo tình trạng của pin
Không đặt pin trên những hộp kim loại, những bề mặt ẩm hoặc bằng kim loại có thể gây chập mạch và nổ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY XÔNG SIÊU ÂM IH 30	
Mức tiêu thụ điện	10W
Tần suất siêu âm	2,5 MH
Tỉ lệ xông	0,2 đến 0,7ml/ phút tùy độ đặc của thuốc
Kích thước hạt thuốc	5 µm MMAD
Dung tích cốc thuốc	tối đa 5ml
Tự động ngắt	Sau 10 phút hoạt động
Điều kiện bảo quản	Nhiệt độ: -10°C đến +50°C Độ ẩm : 45 đến 85%
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ: +15°C đến +30°C Độ ẩm: 45 đến 65%
Kích thước	65x50x140mm
Trọng lượng	185g
Linh kiện kèm theo	Dây điện adapter, Pin có thể nạp lại, mặt nạ người lớn/trẻ em, dây dẫn, túi bảo vệ, 5 cốc thuốc

CHÚ Ý - VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

- Khi mở hộp, kiểm tra xem máy và các linh kiện có bị lỗi hay hỏng không.
- Sử dụng máy theo đúng mục đích sản xuất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những hư hỏng do sử dụng sai mục đích hoặc không đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Trẻ em và người tàn tật khi sử dụng máy cần phải có sự trợ giúp của người lớn.
- Để máy và các linh kiện tránh xa tầm với của trẻ em.
- Chỉ dùng máy với nguồn điện theo đúng thông số đã ghi trong thông số kỹ thuật.
- Không nghiêng hoặc lắc máy khi đang sử dụng, nếu không thuốc sẽ chảy xuống bầu nước.
- Không để máy gần mắt khi đang xông hoặc dùng máy để xông mắt.
- Không bật máy khi chưa cho nước hoặc thuốc vào bầu và cốc.
- Sử dụng thuốc theo đúng loại và liều lượng do bác sĩ yêu cầu.
- Không dùng máy ở nơi có nhiều khí ga.
- Không sờ vào ổ điện hoặc dây điện khi tay ướt để tránh điện giật.
- Làm theo đúng hướng dẫn khi vệ sinh máy.
- Nếu máy bị trục trặc hoặc bị hỏng, tắt máy, ngắt điện và liên hệ với trung tâm bảo hành.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Ngắt điện trước khi vệ sinh máy. Không được ngâm máy vào nước, máy có thể sẽ bị hỏng.
Sau mỗi lần dùng, bạn nên làm vệ sinh máy như sau:

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH

Số 9 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 9426204- (844)8521040- (844) 8212631
Fax: (844) 5762880 Email: tecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.te.com.vn