

MÁY MASSAGE CHUYÊN DỤNG MODEL: ITM


Máy massage đầm hai đầu có hồng ngoại

ITM được sản xuất bằng công nghệ hiện đại dựa trên nguyên lý massage cổ truyền phương Đông, ITM là sự kết hợp khoa học giữa massage đầm và trị liệu bởi tia hồng ngoại. Với thiết kế cực kỳ tinh tế và được chế tạo và chất liệu đặc biệt ABS, máy mát xa đầm lựa chọn lý tưởng cho vấn đề chăm sóc sức khỏe.



Công dụng:

1. Giảm căng thẳng thần kinh, đặc biệt có lợi cho việc điều trị bệnh tăng xương, đau cột sống, lõi đốt sống và đau dây thần kinh tọa.
2. Tia hồng ngoại truyền nhiệt hâm nóng lớp mô dưới da làm giãn nở các mạch máu kích thích tuần hoàn máu và loại bỏ tạp chất. Hiệu quả trong việc điều trị bệnh đau dạ dày, chứng khó tiêu, bệnh huyết áp cao, viêm phế quản, bệnh trĩ.
3. Điều trị chứng viêm khớp, sưng đau vai, chỗ đau do bị sai khớp hoặc bong gân, chứng liệt chi.
4. Các đầu massage hoạt động hiệu quả ở các vùng khác nhau của cơ thể. Massage da sẽ cải thiện chế độ dưỡng da, làm cho da căng bóng, giảm lượng mỡ thừa và tạo dáng đẹp.

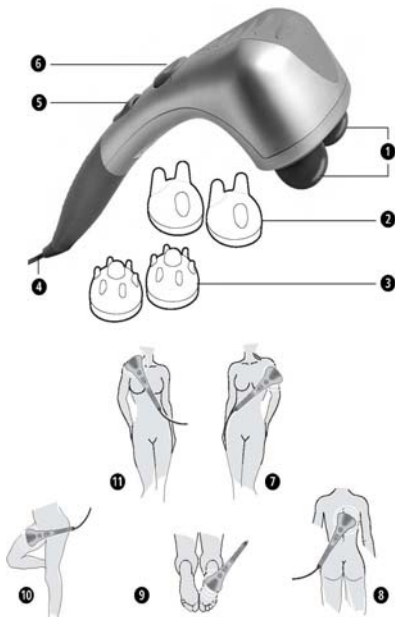

5. Bạn có thể massage tại những vùng sau

- Massage cổ
- Massage tay
- Massage lưng
- Massage chân
- Massage gang bàn chân

Thông tin chung về massage:

Massage là gì?

Massage là một trong những phương pháp săn sóc lâu đời nhất và là một phần quan trọng nhất của vật lý trị liệu. Điều trị cơ học bên ngoài của cơ thể làm thư giãn cơ bắp, tăng cường sự lưu thông trong máu và giúp tổ chức tế bào.



Massage thư giãn đồng thời giúp làm giảm đau dây thần kinh và cơ bắp.

Massage thực sự tác động đến hệ thống mạch máu.

Có một số phương pháp massage cổ điển như: Massage vuốt, massage đầm bóp, massage đập, massage rung... Hơn nữa, còn có nhiều kỹ thuật massage quan trọng khác như: Kỹ thuật đầm bóp, kỹ thuật bấm và day huyết, massage dưới áp lực của nước, kỹ thuật massage bằng tay.

Xoa bóp có thể đóng vai trò như là một liều thuốc giảm đau, tiếp thêm sinh lực cho vòng tuần hoàn máu kích thích các khớp xương điều chỉnh các chức năng và giữ cho bộ phận trên cơ thể ở trạng thái cân bằng, việc xoa bóp có thể ngăn ngừa bệnh tật vì xoa bóp là một biện pháp điều trị hữu hiệu. Trong ngành y học liệu pháp này còn được sử dụng rộng rãi các phòng mạch y học hiện đại

Máy massage ITM hoạt động như thế nào?

Máy massage này dựa trên nguyên tắc cơ bản của massage áp lực vòi nước

Máy có hai đầu massage giúp massage dễ dàng từng phần trên cơ thể.

Mỗi lần có thể chuyển đổi tần số từ 2000 – 3000 vòng / phút. Khi tia hồng ngoại nóng lan rộng cả hai đầu đầm, hơi nóng bắt đầu lan tỏa xuống dưới da làm các mạch máu lưu thông, các lớp bề bảo được phục hồi mới làm cho bạn thấy thoải mái thư giãn.

Điểm kết hợp đặc biệt của máy massage chuyên dụng là kết hợp hơi nóng của tia hồng ngoại với các đầu massage day huyết và đầu massage đầm lan rộng.

ITM sẽ trở thành máy massage chăm sóc sức khỏe cực hiệu quả cho gia đình bạn.

Trước khi sử dụng máy:

Để bắt đầu massage, bạn phải cắm phích cắm vào nguồn điện 220V. Trước khi cắm điện thì bạn cần phải lưu ý máy massage luôn để ở vị trí “OFF”

6. Máy bao gồm

- 01 Thân máy
- 02 Đầu hồng ngoại của máy
- 04 Đầu thay thế
- 01 Núm vật điều chỉnh tốc độ
- 01 Núm bật tắt
- Tay cầm thuận tiện
- Dây điện
- 01 quyển hướng dẫn
- 01 Phiếu bảo hành 3 năm



An toàn cá nhân

Không sử dụng thiết bị cho phụ nữ đang mang thai
Không sử dụng thiết bị cho người đang mang bệnh như: u bướu, đang bị các vết thương loét.

Sự ứng dụng:

Bắt đầu máy massage:

Đẩy nút phía trên bằng ngón tay cái một nấc lên trên. Thiết bị bắt đầu hoạt động.



Chữ M (sẽ cho thấy tín hiệu máy đã sẵn sàng massage)

Tia hồng ngoại:

Bằng cách đưa nút xám lên trên một nấc nữa. Hơi nóng của tia hồng ngoại sẽ tăng thêm, khi đó bạn có thể nhìn thấy chữ M/H tại nút bật.

Điều khiển cường độ massage:

Cường độ massage có thể điều chỉnh để phù hợp với tính nhạy cảm của bạn, chỉ cần vặn xoay tròn nút điều khiển, bạn có thể điều chỉnh cường độ massage liên tục từ 2000 – 3000 vòng /phút.



Hướng dẫn an toàn

Những điều cần phải lưu ý khi sử dụng thiết bị
Chỉ sử dụng massage theo đúng hướng dẫn sử dụng
Không cầm máy massage cùng với dây cắm, không lôi, kéo dây cắm

Tránh không cho trẻ em sử dụng máy massage

Thiết bị sẽ không được bảo hành trong những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn


Không được tự sửa chữa thiết bị, thiết bị phải được sửa chữa bởi sản xuất

Thiết bị không sử dụng khi ở dưới nước, vì vậy không sử dụng thiết bị đang tắm

Nếu có nước lọt vào trong thì cần phải rút ngay phích cắm

Khi massage

3.5
Anwendung

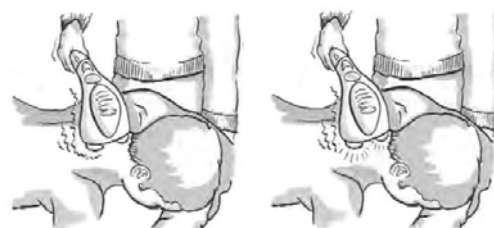

Bạn có thể dễ dàng hoàn toàn massage một mình hoặc nhờ người massage cho bạn. Bật nút ON để massage từng phần của cơ thể. Bạn không nên tập trung vào một vùng quá lâu, và có thể thay đổi tần suất mạnh nhẹ khác nhau trong quá trình massage.

Mỗi lần massage chỉ nên massage 10-15 phút. Để có kết quả massage điều trị một cách hiệu quả bạn nên massage đều đặn thiết bị sẽ làm bạn hài lòng.

Sau mỗi lần máy đã hoạt động từ 10 – 15 phút bạn nên cho máy nghỉ ít phút rồi mới dùng tiếp. Không nên dùng quá thời gian đã quy định.

Tắt máy massage:

Tắt máy massage bằng cách ấn ngược lại nút mà xám về vị trí cho đến khi có thể nhìn thấy được chữ OFF.

Khi thực hiện xong nhớ rút phích điện.

Lau chùi và bảo dưỡng máy:

Luôn rút phích cắm trong khi lau chùi máy

Không dùng bàn chải cứng hoặc sức mạnh để lau chùi máy

Lau thiết bị bằng vải mềm.

Tránh không được để thiết bị rơi vào nước


Phải đảm bảo thiết bị luôn khô ráo khi sử dụng.

Tại sao phải massage?

Chức năng bấm bóp và massage sẽ tăng khả năng tuần hoàn máu và cung cấp ô xy cho tế bào da và loại bỏ chất cặn bã trong cơ thể, giúp con người có tinh thần và thể chất tốt. Điều kỳ diệu hơn là giúp cho con người khỏi mắc chứng bệnh kinh niên mà nó còn tốt hơn cho việc tăng thể lực của cơ thể đồng thời nó còn rất tốt cho việc chăm sóc sức khỏe người già.

Loại bỏ sự tê cứng, giúp bạn năng động hơn. Hầu hết dòng sản phẩm massage của Hãng Medisana đều có thể massage toàn thân. Bên cạnh những tác dụng cho xương sống nó còn có tác dụng với những bộ phận day huyết. Vì vậy rất có lợi cho việc điều trị những bệnh đau kinh niên, những bệnh đau liên quan đến khớp xương.

Giảm đau lưng và thắt lưng.

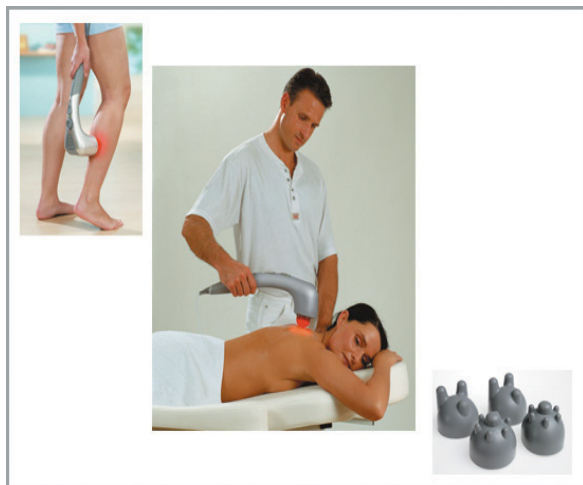

Thông thường sự qua tải của đốt sống và cơ là gây nên chứng đau lưng và thắt lưng chứ không phải là bệnh đặc biệt ở lứa tuổi già và trung niên. Với những sản phẩm về massage bạn có thể ngồi thư giãn toàn bộ, bạn có thể dùng ở mọi tư thế và một vài chức năng có thể hoạt động cùng một lúc. Vì vậy chắc chắn cơ thể sẽ được thoải mái và giảm đau mỏi ở vùng lưng và thắt lưng.

Nâng cao thể trạng và tăng khả năng miễn dịch của cơ thể
Cơ thể con người có hệ miễn dịch hoàn hảo có thể sản sinh ra tế bào chống lại được một số vi khuẩn gây bệnh, nhưng công việc môi trường và những tác động bên ngoài làm con người dễ bị những bệnh thông thường làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Máy massage giúp cơ thể tái tạo tế bào bằng cách đấm bóp, massage cơ thể vì vậy tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Hiệu quả của việc dùng máy massage;

Vùng đốt sống cổ:

Những chứng bệnh thay đổi bất thường mang cảm giác phiền muộn, những chứng bệnh mất ngủ, những cảm giác tê liệt được điều trị bằng cách kích thích những giây thần kinh tạo sự phục hồi chức năng. Ngoài ra vùng này còn có căn bệnh về tai, những chứng đau huyết áp, những căn bệnh đau về mắt.

Cột sống vùng ngực.

Vùng có những chứng đau ngực, khó thở, những triệu chứng đau sơ cứng cổ, bệnh đau dây thần kinh tọa, chứng tê liệt cơ thể tạo ra sự run rẩy chân tay, suy nhược cơ thể, những bệnh về phổi và viêm đường hô hấp, những bệnh hen suyễn những bệnh tiểu đường, bệnh thấp khớp, viêm khớp, chứng giảm khả năng miễn thể.

Cột sống vùng thắt lưng.

Vùng có những bệnh như táo bón, bệnh viêm tĩnh mạch, những hội chứng về đường tiết niệu.

Vùng đốt xương đáy hông

Vùng này ngăn có triệu chứng như viêm ruột thừa, những bệnh về xương cụt.

Lợi ích của tia hồng ngoại.

Tia hồng ngoại là tia có khả năng đâm xuyên với tần số xung 5,6 micromet và được chia thành cận hồng ngoại, trung hồng ngoại và viễn hồng ngoại. Nó có ảnh hưởng tích cực đối với cơ thể con người truyền sâu vào cơ thể và tạo nên những phản hồi kích thích hoạt cá tế bào trao đổi chất mà không để lại một tác động phụ nào. Trong cơ thể chứa hơn 70% là nước trong khi đó phần còn lại tạo ra chất protein và các chất khác. Nếu điều kiện của tế bào hoạt động tích cực hơn và phát triển lớn mạnh thì chúng ta sẽ thấy sống động hơn, có sức chịu đựng tốt hơn. Nó tạo thành những chất trong cơ thể với protein và các chất bên trong khác sau khi đã chiếu tia hồng ngoại, khi đó nó sẽ giúp qua trình trao đổi chất cũng như chất độc được tiết ra nhanh hơn, giúp cho cơ thể loại bỏ được những chất chưa làm cơ thể gọn gang hơn, cơ bắp săn chắc hơn.

SẢN PHẨM BẢO HÀNH 03 NĂM TOÀN CẦU

Điều kiện bảo hành và sửa chữa: Trong trường hợp có lỗi khi sử dụng máy thì nên thông tin với nhà cung cấp.

Những điều kiện bảo hành được áp dụng trong những trường hợp này: **Medisana** đưa ra bảo hành thay đổi các sản phẩm của Hãng 03 năm kể từ ngày mua thiết bị. Bằng chứng ngày mua sẽ được ghi tại Phiếu Bảo Hành. Khi kỹ thuật viên của Hãng kiểm tra sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ có cách sửa chữa không mất phí trong vòng 03 năm bảo hành.

Phần lỗi sản phẩm không nằm trong điều kiện được bảo hành:

Tất cả hỏng hóc do không sử dụng đúng mục đích của máy, như không xem kỹ hướng dẫn sử dụng, dẫn đến sử dụng sai. Sản phẩm bị người sử dụng tự ý sửa chữa.

Đặc tính kỹ thuật:

Điện áp: 230V/ 50Hz

Công suất: 35w

Thời gian hoạt động ngắn nhất: 10 phút

Thời gian hoạt động dài nhất: 30 phút

Độ rung 2000 – 3000 lần /1 vòng

Môi trường hoạt động nơi khô ráo