

MODEL:WBM BỒN MASSAGE CHÂN LÀM NÓNG NƯỚC

Không chỉ đơn thuần là massage chân.

Lời giới thiệu: Medisana, Bậc thầy của việc chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị chăm sóc sức khỏe hiện đại này được các bác sĩ và kỹ sư đứng đầu ngành y của Đức sản xuất và công nhận về tính năng sử dụng cũng như chất lượng sản phẩm này.

Bồn tạo sóng điem vào huyết gan bàn chân và đầu những ngón chân liên tục theo chu trình.

Bồn massage bình thường bán trên thị trường hiện nay chỉ thuần túy tác động cơ học và một động cơ massage. Nên nó không có tác dụng điều trị bệnh chiều sâu trong lĩnh vực y học như sản phẩm của Hãng Medisana.

Sau một thời gian nghiên cứu, cùng với kinh nghiệm điều trị chúng tôi đã khám phá ra rằng kết hợp massage lực đẩy với hai mô tơ tại gang bàn chân và đầu vòi phun trực tiếp vào huyết ngón chân. Ngoài ra với chức năng làm nóng nước kết hợp với đèn hồng ngoại đã cho những kết quả thực sự tốt hơn. Sự tốt hơn đó là gì? Đó là sự lưu thông máu được dễ hơn, sự tuần hoàn máu được thực hiện dễ dàng hơn dưới sự trợ giúp của đèn hồng ngoại trợ giúp của hồng ngoại tác động lên từng tế bào cũng như các đầu dây thần kinh ở trong cơ thể. Khi đó nó sẽ giúp cho cơ thể loại bỏ những tạp chất. Điều kỳ diệu hơn là nó không chỉ tốt cho những người mắc bệnh kinh niên mà nó còn tốt cho việc tăng thể lực và chiều cao của cơ thể đồng thời nó còn tốt cho việc chăm sóc đến sức khỏe của tuổi già. Tất cả những tính năng này của máy đều mang lại kết quả như mong muốn.

Những thế mạnh của việc điều trị massage chân dạng nước.

Là thiết bị điều trị các nhược điểm ở chân sử dụng bồn massage chân tạo sóng cơ chế hồng ngoại. Không chỉ làm đẹp cho bàn chân mà còn mang lại sức khỏe cho con người. Chỉ cần vài phút trong ngày cũng đủ để thư giãn tình trạng căng thẳng của bạn.

Dòng máu từ tim vào các động mạch sẽ tuần hoàn trong toàn bộ cơ thể chảy qua lòng bàn chân cho đến khi quay trở lại tĩnh mạch của tim. Trong vòng một tuần khi chúng ta đặt bàn chân vào bồn massage chân này, việc dẫn nhiệt của liệu pháp điều trị này sẽ ngấm sâu vào dưới da đi qua các mạch máu. Sự phản ứng của các huyết cầu sẽ được truyền đi khắp các mạch máu, làm cho mạch máu lưu thông mà không bị tắc.



Vùng phản xạ của lòng bàn chân là gì?

Vùng phản xạ vào lòng bàn chân liên quan đến các điểm dây thần kinh tại bàn chân.

Các điểm dây thần kinh ấy có quan hệ trực tiếp với nhau quan hệ với các vùng cơ thể khác nhau và có thể tìm

thấy ở khắp nơi trên cơ thể. Vùng lớn tất cả những vùng phản xạ này đều nằm dưới gan bàn chân. Về mặt tự nhiên con người cần đi chân trần trên mặt đất và những phản xạ chính được tập trung nghiên cứu ở đây.



Bởi vì việc massage lòng bàn chân cũng giống như việc massage kích thích cơ thể một cách bình thường. Máu sẽ tuần hoàn tốt hơn trên cả dây thần kinh, các mạch máu và các vùng phản xạ của bàn chân cũng như các cơ quan khác. Do đó quá trình trao đổi chất bình thường và loại bỏ axit uric. Để tránh những ảnh hưởng đến các khớp xương thông qua việc loại bỏ các những chất độc hại này ra khỏi cơ thể. Sau đây là các huyết ở lòng bàn chân liên quan trực tiếp đến các bộ phận của cơ thể trực tiếp đến các bộ phận của cơ thể

1. Não
2. Tuyến yên
3. Mũi
4. Tủy sống
5. Cổ
6. Tuyến giáp
7. Các mạch máu ở thái dương
8. Dạ dày
9. Lá lách.
10. Thận
11. Ruột
12. Thông xoang
13. Thái dương
14. Mắt phải
15. Tai phải
16. Phổi khí quản
17. Vai phải
18. Đầu gối



Bằng việc chiếu tia hồng ngoại sẽ gia tăng hoạt động của các dây thần kinh và các tế bào tăng cường trao đổi chất để có được một cơ thể khỏe mạnh. Kết quả này không một máy massage chân nào có trên thị trường có thể đem lại cho bạn. Với sự áp dụng đa dạng công nghệ mới, nên bất cứ chương trình nào bạn chọn cũng vẫn giúp bạn đạt hiệu quả cho cơ thể và tâm hồn mà mọi người sử dụng cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất. Bồn massage WBM Medisana đã đưa ra một yêu cầu tốt nhất cho việc này. Nó tạo lên sức mạnh để massage bàn chân trong trường hợp có nước hoặc không có nước một cường độ massage rộng và tia hồng ngoại cũng làm tăng thêm độ nóng làm ấm bàn chân khi sử dụng. Nên yêu cầu thiết bị có thể sử dụng

Massage:

Bồn đã trang bị với núm rung, một ống phun massage đầu ngón chân, massage vòi phun và có thể thay đổi được bồn massage tạo sóng WBM có thể massage đến lòng bàn chân và mu bàn chân.



Tia hồng ngoại:

Tia hồng ngoại bật ở vị trí 1 và 3 xuyên qua gan bàn chân tạo cảm giác dễ chịu đồng thời cũng điều trị từ xa cho tim.

Điều trị hơi nóng:

Bồn massage tạo sóng WBM của Medisana tạo nên nước ấm trong thiết bị ở một nhiệt độ thích hợp và luôn đảm bảo rằng nhiệt độ của bồn sẽ duy trì trong khi sử dụng.

Cách chữa bằng xoa bóp bằng dầu thơm.

Hoặc với cách chữa trị dân gian (Với lá ngải cứu đun lấy nước bỏ vài hạt muối rồi ngâm tác dụng của ngải cứu đặc tính nóng nên dễ làm khí huyết lưu thông, với củ gừng bạn có thể giã nhỏ cho nước sôi và muối rồi ngâm hoặc với gừng cũng có tác dụng chữa mỏi và giảm đau. Với những người mất ngủ có thể dùng hoa cúc rất tốt điều trị chứng mất ngủ an thần và giúp làm đẹp da.

Gợi ý sử dụng:

Bạn chỉ cần sử dụng 10-15 phút cho việc massage ngâm chân mỗi ngày từ 1-2 lần. Bạn lưu ý khi sử dụng ngâm chân bằng thảo dược yêu cầu phải gạt nước trong không để trong nước còn bã thuốc sẽ làm tắc những đầu vòi phun tạo sóng gây cháy và hỏng mô tơ. Giới thiệu chung về sức khỏe sau khi dùng sản phẩm WBM: Mọi người đều có những câu hỏi khác nhau về massage. Nhưng sau khi sử dụng thiết bị bồn massage WBM của hãng Medisana chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ thấy được cảm giác thoải mái và khỏe hơn. Khi nước tạo dòng xoáy sẽ giúp bạn xua tan mệt mỏi. Bạn sẽ thấy dễ ngủ hơn và giảm được đau nhức hơn.

Massage chân với nước.


Trước khi đổ nước vào thiết bị, phải đảm bảo rằng máy không cắm điện.

Massage chân không cần nước.

Máy có thể sử dụng cho việc massage không cần dùng nước. Đặt nút bật ở vị trí số 1 massage rung với tia hồng ngoại.

Ứng dụng:

Đổ nước, bồn massage tạo sóng WBM Medisana có thể chứa 3.3 lít nước, độ cao tối đa của mức nước đã được đánh dấu trong bồn.

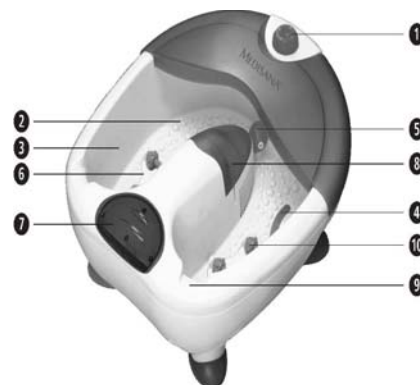

Chức năng cài đặt:

Ngồi thoải mái trước bồn massage sau đó lựa chọn một trong 3 chức năng khác nhau. Chức năng sử dụng từ công tắc số 1.

Chức năng làm nóng:

Lựa chọn chức năng làm nóng. Thiết bị bồn massage tia hồng ngoại WBM Medisana bao gồm cả sự cải tiến về chức năng làm nóng. Đây là kỹ thuật cải tiến làm cho thiết bị có thể giữ nước luôn ở nhiệt độ ổn định trong khi đang áp dụng hoặc làm ấm nước.

Ở vị trí 1: Duy trì nhiệt độ nước, hoặc làm ấm một chút.

Ở vị trí 2 và 3 làm nóng nước, thì chức năng làm nóng nước sẽ tự động bật lên. Vòi lạnh sẽ đạt tới nhiệt độ hài hòa cho việc vừa đủ thư giãn bàn chân sau 10 phút và giữ nhiệt độ luôn ổn định trong khi đang áp dụng chúng. Nếu nước ở vị trí số 2 và 3 quá nóng với bạn thì vặn quay lại ở vị trí 1 nước sẽ mát như bạn muốn.

Lau chùi và bảo dưỡng máy:

Trước khi lau chùi thiết bị phải chắc chắn rằng thiết bị đã tắt và phích điện đã được rút ra

Đổ nước ra khỏi bồn chứa, sau đó lau sạch thiết bị bằng vải sợi mềm khi thiết bị đã nguội

Không sử dụng hóa chất để lau chùi máy, nó có thể làm hỏng bề mặt của máy

Cất thiết bị nơi khô ráo.

Lợi ích của tia hồng ngoại.

Tia hồng ngoại là tia có khả năng đâm xuyên với tần số xung 5,6 micromet và được chia thành cận hồng ngoại, trung hồng ngoại và viễn hồng ngoại. Nó có ảnh hưởng tích cực đối với cơ thể con người truyền sâu vào cơ thể và tạo nên những phản hồi kích thích hoạt cả tế bào trao đổi chất mà không để lại một tác động phụ nào. Trong cơ thể chứa hơn 70% là nước trong khi đó phần còn lại tạo ra chất protein và các chất khác. Nếu điều kiện của tế bào hoạt động tích cực hơn và phát triển lớn mạnh thì chúng ta sẽ thấy sống động hơn, có sức chịu đựng tốt hơn. Nó tạo thành những chất trong cơ thể với protein và các chất bên trong khác sau khi đã chiếu tia hồng ngoại, khi đó nó sẽ giúp qua trình trao đổi chất cũng như chất độc được tiết ra nhanh hơn, giúp cho cơ thể loại bỏ được những chất chưa làm cơ thể gọn gàng hơn, cơ bắp săn chắc hơn.

SẢN PHẨM BẢO HÀNH 03 NĂM TOÀN CẦU

Điều kiện bảo hành và sửa chữa: Trong trường hợp có lỗi khi sử dụng máy thì nên thông tin với nhà cung cấp.

Những điều kiện bảo hành được áp dụng trong những trường hợp này: **Medisana** đưa ra bảo hành thay đổi các sản phẩm của Hãng 03 năm kể từ ngày mua thiết bị. Bằng chứng ngày mua sẽ được ghi tại Phiếu Bảo Hành. Khi kỹ thuật viên của Hãng kiểm tra sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ có cách sửa chữa không mất phí trong vòng 03 năm bảo hành.

Phần lỗi sản phẩm không nằm trong điều kiện được bảo

hành: Tất cả hỏng hóc do không sử dụng đúng mục đích của máy, như không xem kỹ hướng dẫn sử dụng, dẫn đến sử dụng sai. Sản phẩm bị người sử dụng tự ý sửa chữa.

Thông số kỹ thuật:

Tên và model: Bồn massage tạo sóng WBM

Cân nặng: 3,2 kg

Điện áp: 230 V/50Hz

Công suất: Với chương trình 01 là 160 W, với chương trình 2 là 320 W, với chương trình 3 là 490 W



Công ty Thiết Bị Công Nghệ Cao TM: NK & PP

Hãng Medisana tại Việt Nam

Địa chỉ: 103 E8 Phương Mai, Hà Nội

Tel:04.35763435 * Fax: 04.345763436

Thông tin chung về massage:

Massage là gì?

Massage là một trong những phương pháp săn sóc lâu đời nhất và là một phần quan trọng nhất của vật lý trị liệu. Điều trị cơ học bên ngoài của cơ thể làm thư giãn cơ bắp, tăng cường sự lưu thông trong máu và giúp tổ chức tế bào. Massage thư giãn đồng thời giúp làm giảm đau dây thần kinh và cơ bắp.

Massage thực sự tác động đến hệ thống mạch máu.

Có một số phương pháp massage cổ điển như: Massage vuốt, massage đấm bóp, massage đập, massage rung... Hơn nữa, còn có nhiều kỹ thuật massage quan trọng khác như: Kỹ thuật đấm bóp, kỹ thuật bấm và day huyết, massage dưới áp lực của nước, kỹ thuật massage bằng tay.

Tại sao phải massage?

Chức năng đấm bóp và massage sẽ tăng khả năng tuần hoàn máu và cung cấp ô xy cho tế bào da và loại bỏ chất cặn bã trong cơ thể, giúp con người có tinh thần và thể chất tốt. Điều kỳ diệu hơn là giúp cho con người khỏi mắc chứng bệnh kinh niên mà nó còn tốt hơn cho việc tăng thể lực của cơ thể đồng thời nó còn rất tốt cho việc chăm sóc sức khỏe người già.

Loại bỏ sự tê cứng, giúp bạn năng động hơn. Hầu hết dòng sản phẩm massage của Hãng Medisana đều có thể massage toàn thân. Bên cạnh những tác dụng cho xương sống nó còn có tác dụng với những bộ phận day huyết. Vì vậy rất có lợi cho việc điều trị những bệnh đau kinh niên, những bệnh đau liên quan đến khớp xương.

