



Luôn đồng hành cùng bạn

MÁY MÁT XA CHÂN UFM-260

Chăm sóc chân tốt cũng là một cách tốt để chăm sóc sức khỏe. Đôi chân hay còn được gọi là trái tim thứ hai của cơ thể là phần tập trung của toàn cơ thể, là nơi chứa khoảng 60 vùng kích ứng và 7000 huyết. Ta có thể cải thiện các phần cơ thể yếu và ngăn ngừa bệnh tật bằng cách kích thích những vùng và các huyết này và nhờ thế tác động đến nhịp điệu vận hành của toàn cơ thể.

Công ty Unix- Maxsta sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm đã chế tạo thành công máy mát xa chân BIO với chất lượng cao được người tiêu dùng Hàn Quốc cũng như Châu Âu tin nhiệm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY MÁT XA CHÂN UFM-260	
Hiệu điện thế	AC 220V 60Hz
Mức tiêu thụ điện năng	45W
Tốc độ rung	3500/ phút
Khối lượng	2900 g
Kích cỡ	330 x 320 x 130mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm giắc điện vào ổ nguồn. Nhấn nút On/Off.
- Lựa chọn tốc độ mát xa thích hợp
- Sẽ có hiệu quả hơn nếu bạn giới hạn sử dụng trong vòng 10 phút một lần, sau đó tạm ngừng 15 phút trước khi sử dụng tiếp.

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

❖ TRƯỚC KHI DÙNG

1. Tham vấn bác sĩ nếu bạn mắc bệnh ung thư, bị các bệnh tim mạch.
2. Không sử dụng máy ở nơi ẩm ướt như phòng tắm...
3. Dùng máy với nguồn điện theo đúng tham số đã ghi trên máy.

4. Tắt công tắc trước khi cắm điện.
5. Không sử dụng máy đồng thời với các công cụ chữa bệnh khác.

❖ TRONG KHI SỬ DỤNG

1. Nếu phát hiện bất cứ trục trặc nào, phải lập tức ngừng sử dụng, tắt máy và rút giắc cắm ra khỏi ổ điện.
2. Ngừng dùng máy nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu.
3. Nếu mất điện đột ngột, tắt máy và rút điện.
4. Lần đầu sử dụng hoặc để làm quen hãy đặt máy ở tốc độ chậm.
5. Không dùng máy để mát sa đầu, cổ, ngực trên và vùng mắt.

❖ SAU KHI DÙNG XONG

1. Tắt máy.
2. Rút giắc cắm khỏi ổ điện.
3. Cất máy ở nơi khô ráo, sạch sẽ.

CÁC CHÚ Ý KHÁC

Không tác động mạnh hoặc làm rơi máy, có thể gây ra hỏng hoặc trục trặc.

Không đứng hoặc ngồi hẳn lên máy.

Tránh xa tầm với của trẻ em.

Không nhét thêm bất cứ vật gì như mảnh kim loại vào các khe trên vỏ máy.

Nếu cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn khi dùng máy, giảm bớt độ rung và thời gian sử dụng xuống.

Nếu vẫn tiếp tục thấy khó chịu, ngừng dùng ngay và hỏi bác sĩ.

BẢO QUẢN

- Tắt máy, ngắt điện sau khi dùng xong hoặc trước khi lau rửa máy.
- Lau vỏ ngoài bằng vải ướt sau đó lau lại bằng vải khô. Không lau rửa trực tiếp bằng nước. Đặc biệt không dùng benzen, chất pha loãng hoặc các hoá chất khác.
- Chỉ lau thanh công tắc bằng vải khô.
- Nếu máy bị hỏng, không được tự sửa chữa, hãy thông báo cho đại lý hoặc trung tâm bảo hành gần nhất.
- Không được tự động thay đổi lắp ráp lại máy.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành

Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631

FAX: (844) 5762880. Email: tecmedical@hn.vnn.vn

Website: www.tte.com.vn