

CÂN SỨC KHỎE GS 27

Cân sức khỏe GS27 là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ tiên tiến của Beurer. Với tính chính xác cao, thiết kế sang trọng, cân GS 27 đã nhanh chóng chiếm lĩnh được cả thị trường Châu Âu và thế giới. Sản phẩm đã đạt được các chứng chỉ Châu Âu và quốc tế về chất lượng như CE, ISO...

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của thiết bị, cần đọc kỹ và làm đúng theo những chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.



CÁCH SỬ DỤNG

1. Khởi động cân:

- Lần đầu sử dụng, cần rút miếng nhựa bảo vệ ở khoang pin ra để pin có thể tiếp xúc với điện cực được.
- Khởi động cân bằng cách đặt bàn tay hoặc bàn chân lên hai thanh cảm ứng cùng một lúc và nhấn xuống đến khi màn hình hiển thị đồng thời các thông số thì bỏ tay hoặc chân ra.
- Cân sẽ tự động kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, màn hình sẽ hiển thị "0.0 KG". Thiết bị đã sẵn sàng để đo trọng lượng cơ thể
- Đứng thẳng lên cân sao cho trọng lượng dồn đều lên hai chân. Cân sẽ tự động đo và cho bạn kết quả cân nặng chỉ sau vài giây.

- Cân sẽ tự động tắt trong vòng 10 giây sau khi bạn bước khỏi cân.

2. Hiển thị lỗi:

Cân sẽ hiển thị thông báo "Err" khi có lỗi. Bạn nên chờ cân tắt sau đó tiến hành cân lại. Lưu ý: Luôn luôn khởi động cân trước, đợi đến khi màn hình hiển thị "0.0" mới bước lên cân để cân.

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

1. Không đứng lên cân khi chân ướt hoặc khi mặt cân bị ướt để tránh bị trượt
2. Bảo vệ cân tránh bị va đập, ẩm ướt, bụi hoặc bị dao động nhiệt độ lớn hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao.
3. Khi xuất ra khỏi nhà máy, cân được cài đặt theo đơn vị 'kg'. Nếu bạn muốn chuyển sang các đơn vị 'pound', hoặc 'stone', hãy điều chỉnh công tắc màu đen đằng sau cân.
4. Khi sử dụng cân đặt cân ở nơi có bề mặt bằng phẳng, chắc chắn để đảm bảo tính chính xác của kết quả đo được.
5. Kết quả đo được chỉ phục vụ cho mục đích tham khảo, không thể thay thế các cuộc kiểm tra y tế.
6. Nên lau cân thường xuyên bằng giẻ ẩm, nhưng tránh không dùng các chất tẩy rửa hoặc ngâm hẳn cân vào nước.
7. Trong mọi trường hợp không được tự ý sửa chữa. Nếu cân bị trục trặc, trước tiên cần kiểm tra xem pin đã đặt đúng cực chưa (cực dương hướng lên trên), khi cần thiết có thể thay pin. Nếu cân vẫn không hoạt động, hoặc có vấn đề bất thường, cần liên lạc với cửa hàng hoặc trung tâm bảo hành gần nhất.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH
Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631

FAX: (844) 5762880. Email: ttecmedical@hn.vnn.vn

Website: www.tte.com.vn