

## TẮM CHƯỜM NÓNG TM23



### TIỆN ÍCH CỦA TẮM CHƯỜM BEURER

Các loại tắm chườm nóng đang càng ngày càng được ưa chuộng và sử dụng ở các gia đình. Chúng đem lại nhiều tác dụng tích cực trong việc giảm bớt căng thẳng, đau nhức các cơ bắp, đau lưng, chống cảm lạnh, giảm đau dây thần kinh, thấp khớp, lạnh chân tay,...

Beurer đã đưa công nghệ thông minh Smart vào việc chế tạo và đem đến cho các bạn các loại tắm chườm đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE.

Với công nghệ Smart, nhiệt độ tắm chườm được điều chỉnh chính xác theo đúng mức nhiệt đã chọn. Thời gian làm nóng ngắn hơn rất nhiều so với những sản phẩm tắm chườm thông thường. Nếu nhiệt độ vượt quá mức nhiệt đã chọn thì lượng nhiệt sẽ tự động giảm dần để đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định và an toàn cho người sử dụng.

Tắm chườm sẽ tự ngắt nếu có trục trặc hoặc lỗi trong quá trình sử dụng.

### ĐẶC TRƯNG RIÊNG CỦA TM 23

Tắm chườm TM23 thích hợp cho việc chườm ấm. Trong mỗi tắm chườm có kèm theo một lớp giữ ấm bằng bông xốp, và người ta đã nghiên cứu thấy rằng nhiệt độ truyền sang cơ thể được cải thiện đáng kể khi dùng phương pháp chườm ấm này. So với phương pháp chườm khô truyền thống, chườm ấm dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tắm chườm khô (không cần làm ấm trước khi dùng).

Tắm chườm TM23 có 4 mức điều khiển:

Tắt: 0

Mức nhiệt thấp: 1

Mức nhiệt trung bình: 2

Mức nhiệt tối đa: 3

Khi bắt đầu sử dụng, tốt nhất nên sử dụng mức nhiệt cao nhất để làm nóng nhanh, sau đó mới chuyển sang mức nhiệt thấp hơn.

Công tắc sẽ sáng đèn khi tắm chườm được cắm điện và sử dụng.

### CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Sử dụng nguồn điện theo đúng những thông số đã ghi trên tắm chườm
- Trong khi đang sử dụng không gấp hoặc cuộn tắm chườm.
- Không gài đinh gim hoặc kim vào tắm chườm, tránh để công tắc và dây điện tiếp xúc với nước.
- Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ làm ấm vỏ bọc ngoài và lớp giữ ấm đính kèm khi đã rút giắc cắm ra khỏi ổ điện.
- Có thể làm ấm bằng cách nhúng hoặc phun nước lên vỏ bọc và lớp giữ ấm, sau đó vắt sạch. Trước khi cắm điện, phải chắc chắn là vỏ bọc và tấm giữ ấm đã ráo nước
- Không được để công tắc tiếp xúc với nước. Không được để tắm chườm quá ướt khiến cho nước chảy dọc theo dây dẫn ngấm vào công tắc.
- Lớp nhựa của tắm chườm đã được làm kín nước nhưng luôn phải kiểm tra kỹ và không sử dụng khi có dấu hiệu hỏng hoặc mòn rách.
- Bạn không cần dùng bất cứ loại kem, hoặc dầu dưỡng nào khi sử dụng tắm chườm vì trong một số trường hợp nhất định, những chất này có thể làm hỏng lớp nhựa của tắm chườm.
- Công tắc có thể bị nóng lên, vì thế, trong quá trình sử dụng không được đặt công tắc lên trên hoặc bọc trong tắm chườm.
- Nếu có dấu hiệu trục trặc hoặc sử dụng không đúng, hỏng dây điện,... cần phải thông báo cho nhà sản xuất hoặc các đại lý phân phối trước khi tiếp tục sử dụng. Việc sửa chữa phải do người có chuyên môn đảm nhiệm.
- Khi không sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ điện và cất giữ ở nơi khô ráo.

### BẢO QUẢN

Hơi nóng ẩm có thể làm gia tăng sự phát triển của vi khuẩn. Vì thế, nên lau khô lớp vỏ nhựa sau mỗi lần chườm ấm; Lớp vỏ bọc và lớp giữ ấm phải được giặt thường xuyên bằng nước ấm để đảm bảo vệ sinh.

### ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH**  
Số 9 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631

FAX: (844) 5762880 Email: [tecmedical@hn.vnn.vn](mailto:tecmedical@hn.vnn.vn)

Website: [www.tte.com.vn](http://www.tte.com.vn)