

ĐÈN HỒNG NGOẠI IL50




Công dụng của tia hồng ngoại

Ánh sáng của một ngọn đèn thông thường không đem lại tác dụng làm lành vết thương hay các công dụng y học. Tuy nhiên, tia hồng ngoại, đã được y học thế giới liệt vào nhóm của các "thiên nhiên liệu pháp", lại có thể đem lại các kết quả điều trị rất hữu ích.

Tia hồng ngoại sẽ tạo ra nhiệt năng để truyền vào cơ thể người. Dưới ảnh hưởng của tia hồng ngoại, nhiệt độ của máu sẽ tăng, giúp máu tuần hoàn dễ dàng hơn, tăng cường quá trình trao đổi chất và kích thích năng lượng tự bảo vệ của cơ thể. ánh sáng hồng ngoại có thể giúp chóng lành các vết thương (tắt nhiên đừng lạm dụng để làm bỏng da!) Đèn hồng ngoại được sử dụng rất hiệu quả trong việc chữa trị đau lưng, viêm bàng quang, đau răng, đau dây thần kinh, đau đầu kinh niên, viêm xoang và viêm tai giữa. Đèn hồng ngoại còn có thể sử dụng song song với các biện pháp điều trị các bệnh về tai mũi họng, hữu ích trong việc chăm sóc sắc đẹp và da mặt, đặc biệt là trong việc làm sạch da.

Mô tả khái quát

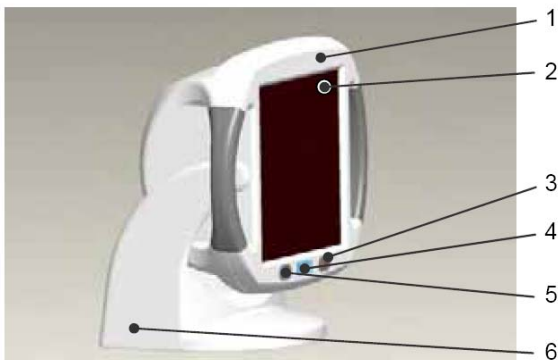

1	Thân đèn với tay cầm, có thể xoay các góc từ 0 đến 50 độ
2	Mặt đèn
3	Nút bật/ tắt (On/Off)
4	Hiển thị thời gian sử dụng chiếu đèn
5	Nút hẹn giờ (cài đặt thời gian sử dụng từ 1-15 phút)
6	Chân đèn (có khoang để dây điện)

2. Sử dụng đèn hồng ngoại

Trước khi sử dụng

- Tháo bỏ tất cả các vật liệu bao gói trước khi sử dụng đèn. Luôn đảm bảo đèn được đặt trên một mặt phẳng an toàn (không nghiêng để gây đổ hoặc có các vật liệu dễ cháy ở gần.) Để cách các vật khác ít nhất 1m, để tránh tình trạng đèn quá nóng.
- Không treo đèn lên tường hoặc trần nhà.
- Cắm giắc cắm vào ổ điện. Nhấn nút On/ Off, màn hình hiển thị thời gian sử dụng là 15 phút. Tránh va chạm mạnh vào đèn khi đang sử dụng.
- Nhấn và giữ hoặc nhấn nhiều lần nút chọn thời gian (5) để chọn thời gian chiếu đèn phù hợp (bạn có thể chọn thời gian từ 1 đến 15 phút).
- Thời gian đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình.
- Ngồi thoải mái trước đèn, điều chỉnh đèn chiếu vào đúng phần cần điều trị,
- Vị trí của đèn phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm với nhiệt của người sử dụng và yêu cầu của điều trị. Tuy nhiên cần để đèn cách người ít nhất là 30cm.
- Chỉ nên sử dụng đèn mỗi lần tối đa 15 phút. Sau 15 phút cần tắt đèn, chờ nguội bớt rồi mới sử dụng tiếp.

Sử dụng đèn

- Nhắm hoặc che mắt lại khi cần chiếu đèn vào mặt.
- Nhấn nút On/ Off, đèn sẽ tự động bật.
- Dùng nút hẹn giờ (5) để cài đặt thời gian chiếu đèn (trong khoảng từ 1 đến 15 phút).
- Trong lúc đang chiếu đèn, bạn cũng có thể bấm nút hẹn giờ để cài đặt lại thời gian sử dụng.
- Đèn sẽ tự động tắt khi hết thời gian cài đặt.
- Sau khi dùng xong cần nhấn nút On/ Off để tắt đèn và rút giắc cắm ra khỏi ổ điện.

- Lưu ý: Trong khi sử dụng cần thường xuyên kiểm tra phần da được chiếu đèn, nếu có dấu hiệu da bị dị ứng cần ngừng dùng đèn ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Bấm nút On/ Off trong lúc đang sử dụng để tắt đèn.
- Không cho đèn vào hộp ngay khi vừa sử dụng xong, đèn còn đang nóng.

Chú ý khi sử dụng đèn

- Chỉ sử dụng đèn theo đúng mục đích sản xuất
- Không sử dụng khi đèn có dấu hiệu bị nứt, vỡ.
- Luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là:
 - Dùng đèn với nguồn điện theo đúng thông số ghi trên đèn. Tắt đèn, rút giắc cắm khỏi ổ điện ngay sau khi dùng xong.
 - Không nên động vào ổ cắm khi tay ướt,
 - Không sử dụng đèn ở gần chỗ quá ẩm ướt hoặc có nước (ví dụ: như trong nhà tắm).
 - Không nhúng đèn vào nước hoặc bất cứ dung dịch nào, không được để nước ngấm vào đèn.
 - Nếu đèn bị rơi, hoặc bị nước ngấm vào, không được dùng tiếp. Cần nhờ trung tâm bảo hành kiểm tra trước khi sử dụng.
 - Không sử dụng đèn khi đang ngủ.
 - Không sử dụng đèn gần các vật dễ cháy.
 - Nếu dây điện, hoặc vỏ đèn bị hỏng, cần liên hệ với trung tâm bảo hành gần nhất để sửa chữa.
- Trước khi sử dụng đèn cần đọc kỹ và hiểu các thông tin cần biết. Tránh xa tầm với của trẻ em. Trẻ em và người tàn tật khi dùng đèn cần phải có sự giúp đỡ của người lớn đã biết cách sử dụng.
- Các bệnh nhân mất cảm giác về nhiệt như người bị bệnh tiểu đường, tâm thần phân liệt, người bị sẹo ở vùng cần điều trị, người dễ bị dị ứng, hoặc người sau khi uống thuốc, uống rượu, cần được bác sĩ tư vấn trước khi sử dụng đèn.
- Mặt đèn khi đang sử dụng hoặc vừa sử dụng xong thường rất nóng, tránh động vào để phòng bị bỏng.

4. Vệ sinh đèn/thay bóng đèn

Cần tắt đèn, rút điện và chờ đèn nguội trước khi làm vệ sinh đèn hoặc thay bóng. Có thể lau đèn bằng giẻ ẩm. Không sử dụng các loại chổi cọ làm xước đèn hoặc các loại chất tẩy. Tránh làm ướt đèn (đặc biệt không được để nước lọt vào bên trong đèn.) Chỉ sử dụng khi đèn tuyệt đối khô. Lưu ý: nếu bóng hỏng chỉ được thay bằng các bóng đèn hồng ngoại cùng loại.

Loại bóng đèn thay thế:

Đèn Halogen 220-240V/300W 118mm R7S

Có thể là:

- Đèn nguyên bản do hãng Beurer sản xuất.
- Đèn Osram: Haloline 64705 – 230 V- R7S 4400 lm

- Đèn Philips Plusline Pro Small / 300 T3 Q /CL /P 230 V; 300 W; R7S

Cách thức thay bóng đèn:

- Sau khi tắt đèn, rút điện, chờ đèn nguội hẳn, úp mặt kính xuống bề mặt phẳng, sử dụng tua vít phù hợp, mở 6 ốc vít sau đèn,
- Để đèn sao cho mặt kính có thể đặt trên nền như hình dưới:



- Một tay cầm đầu trái hoặc phải của đèn, tay kia ấn vào đầu còn lại để lấy đèn ra khỏi giắc
- Dùng một mảnh vải mềm lót tay khi lắp đèn mới vào, tránh tình trạng mồ hôi tay làm ảnh hưởng đến đèn. Lắp đèn mới vào giắc.
- Lắp mặt kính vào đèn, vặn chặt các ốc vít.
- Lưu ý: không được để các vật lạ rơi vào trong đèn hoặc các dây điện bị kẹt.

Bảo quản

Sau khi dùng xong cần tắt đèn, rút điện, chờ đèn nguội hẳn rồi mới cất vào hộp. Để đèn ở nơi khô ráo.

Thông số kỹ thuật

Model	IL50
Nguồn điện	AC 220 V-240 V / 50-60 Hz
Điện năng tiêu thụ	300 W
Bộ hẹn giờ	Điều chỉnh từ 1 đến 15 phút
Kích cỡ	270 x 270 x 190 mm
Trọng lượng	Khoảng 1.5 kg
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ : 10°C ÷ 35°C Độ ẩm : 50 ÷ 90% RH
Điều kiện bảo quản và vận chuyển	Nhiệt độ: -10°C ÷ 50°C Độ ẩm: 50% ÷ 90% RH
Mức hồng ngoại	Tối đa 200 W / sq m

Đại diện phân phối và bảo hành sản phẩm chính hiệu BEURER

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành
Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
FAX: (844) 5762880. Email: ttecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn